

GHB- und Ketamin-Detektorarmband für Getränke – individuell gestaltbar

Reference: P9816



Das Armband zum Nachweis von GHB und Ketamin in Getränken – personalisiert wird in Frankreich hergestellt. Es ist ein einfaches und zuverlässiges Hilfsmittel, ideal für den Einsatz bei Veranstaltungen, Partys oder Festivals. Es kann mit Ihrem Logo personalisiert werden.

Herstellungsland: Frankreich

Länge: 24 cm

Zusammensetzung: Papier

Breite: 1.7 cm

Thema: Betäubungsmittel

Anwendungshinweise: Appliquez une goutte de la boisson à tester sur chaque zone du bracelet dédiée au test. Enduisez délicatement chaque point sans mélanger les différentes zones. Laissez sécher 1 à 3 minutes. Si l'une des zones de test vire au bleu, ne consommez surtout pas la boisson. Précautions importantes : Les résultats sont destinés à un usage personnel et à titre indicatif uniquement. Assurez-vous que les zones de test sont complètement sèches avant chaque utilisation. Les boissons ou liqueurs déjà de couleur bleue peuvent provoquer un faux positif. Ne testez pas de boissons contenant des produits laitiers, des crèmes ou des liquides huileux. Jetez immédiatement toute boisson suspecte. Un résultat positif ne doit jamais être la seule base pour déterminer la présence de substances illégales.



Das **Armband zum Nachweis von GHB und Ketamin in Getränken** – Personalisiert ist ein diskretes

und praktisches Accessoire, mit dem Sie Ihre Getränke vor dem Verzehr überprüfen können. Dieses Armband wurde für eine einfache und schnelle Anwendung entwickelt und bietet Ihnen einen ersten Schutz vor Substanzen, die in Ihren Cocktails, Gläsern und verschiedenen Getränken gelöst sind.

Unser in Frankreich hergestelltes und in französischen Labors streng getestetes Testarmband garantiert Zuverlässigkeit und Präzision für eine vertrauensvolle Anwendung.

Einfache Anwendung:

1. Geben Sie einen Tropfen des zu testenden Getränks auf jeden Testbereich des Armbands.
2. Verteilen Sie den Tropfen vorsichtig, ohne die verschiedenen Bereiche zu vermischen.
3. Lassen Sie das Armband 1 bis 3 Minuten trocknen.
4. Wenn sich einer der Testbereiche blau verfärbt, trinken Sie das Getränk auf keinen Fall.

Achtung : Dieser Test erkennt nur grundlegende Drogen wie GHB und Ketamin.

Wichtige Vorsichtsmaßnahmen:

- Die Ergebnisse sind nur für den persönlichen Gebrauch und dienen lediglich als Anhaltspunkt.
- Stellen Sie sicher, dass die Testbereiche vor jedem Gebrauch vollständig trocken sind.
- Getränke oder Liköre, die bereits blau gefärbt sind, können zu einem falsch positiven Ergebnis führen.
- Testen Sie keine Getränke, die Milchprodukte, Sahne oder ölige Flüssigkeiten enthalten.
- Entsorgen Sie verdächtige Getränke sofort.
- Die Ergebnisse dienen nur zu Informationszwecken und müssen für eine offizielle Auswertung durch eine Laboranalyse bestätigt werden.

Unser **Armband zum Nachweis von GHB und Ketamin** ist nicht nur ein Testinstrument: Es kann mit Ihrem Logo oder dem Ihrer Organisation personalisiert werden. Es eignet sich ideal für Sensibilisierungskampagnen, die Verteilung an Partner oder Präventionsprogramme und ist ein unverzichtbares Instrument, um eine starke Botschaft zu vermitteln und gleichzeitig das verantwortungsbewusste und engagierte Image Ihres Unternehmens zu stärken.

Warum sollten Sie sich für unser Armband entscheiden?

- Einfach und schnell zu verwenden
- Diskret und tragbar
- Beidseitig laminiert für bessere Widerstandsfähigkeit
- Schutzaufkleber auf den Testbereichen
- In einem französischen Labor getestet
- Ideal für Ausflüge, Partys, Festivals oder private Veranstaltungen
- Personalisiert für den Vertrieb

Geben Sie Ihren Kunden und Mitarbeitern die Möglichkeit, bei Ihren Sensibilisierungsprogrammen ein beruhigendes Gefühl am Handgelenk zu tragen.

NB: Bestellungen erfolgen in Paketen zu je 10 Tests.