

Benzodiazepin-Urintest (BZO) – Packung mit 25 Tests

Reference: P9261



Benzodiazepin-Urintest zum Nachweis der Substanz innerhalb von 5 Minuten. Packung mit 25 Tests, hergestellt in Frankreich und CE-zertifiziert.

Herstellungsland: Frankreich

Lagerbestand verfügbar: Unbegrenzt: Produktion auf Anfrage

Zollcode: 3822000000

Länge: 13 cm

Menge pro Karton: 54

Zusammensetzung: Kunststoff

Breite: 17 cm

Höhe: 10 cm

Stückgewicht: 247 g

Produktverpackung: Aluminiumbeutel

Verbrauchsdatum: Mehr als 16 Monate

Normen und Zertifikate: CE

Anwendungshinweise: 1- Prendre l'urine du patient dans un flacon. 2- Le sachet en aluminium doit être ouvert à température ambiante. Il faudra ensuite le retirer de son sachet et l'utiliser immédiatement. 3- Vous disposez de 3 puits, mettre 3 gouttes dans chacun d'entre eux. 4- Attendre 5 minutes et lire le résultat. Au-delà de 10 minutes, ne pas prendre en compte l'apparition d'une bande. 5- Si deux lignes apparaissent au niveau de la zone de contrôle : le test est négatif. Si aucune bande colorée n'apparaît au niveau de la zone test (T) : le test est positif. Si aucune bande n'apparaît, ou seulement celle située au niveau de la zone de test (T) : le test est non significatif.



Benzodiazepin ist in bestimmten, von Ärzten verschriebenen Medikamenten enthalten. Ursprünglich dient

es zur Linderung von Angst- und Schlafstörungen. Leider birgt diese Substanz ein hohes Suchtpotenzial. Das Absetzen von Benzodiazepin erfordert einen begleiteten Entzugsprozess, um unerwünschte Entzugerscheinungen zu vermeiden.

Um das Risiko einer Abhängigkeit zu vermeiden, sollte die empfohlene Behandlungsdauer 12 Wochen (einschließlich Entzugsphase) zur Behandlung von Angstzuständen und 4 Wochen zur Behandlung von Schlaflosigkeit nicht überschreiten.

Außerhalb des medizinischen und rechtlichen Rahmens wird diese Substanz insbesondere konsumiert, um ein Gefühl der Entspannung zu erzeugen und Emotionen zu dämpfen.

Im beruflichen Umfeld ist es wichtig, den Konsum dieser Substanz zu erkennen, da sie das Unfallrisiko erhöhen kann. Am Steuer verringert sie die Aufmerksamkeit des Fahrers und macht ihn schläfrig. Gleiches gilt für risikoreiche Berufe, in denen es wichtig ist, voll leistungsfähig zu sein, um keine Gefahr für sich selbst oder andere darzustellen. Je mehr eine Person diese Substanz konsumiert, desto stärker entwickelt sie eine Abhängigkeit, Störungen und damit verbundene Nebenwirkungen wie Gedächtnisverlust, Bewegungsschwierigkeiten und Schlaflosigkeit. Diese Nebenwirkungen erhöhen das Unfallrisiko zusätzlich.

Um das Vorhandensein dieser Substanz festzustellen, verwendet unser **Benzodiazepin-Urintest** ein immunochromatographisches Verfahren. Wenn Sie eine Probe auf eine Kassette geben, können Sie innerhalb von 5 Minuten feststellen, ob eine Person unter dem Einfluss dieser Substanz steht oder nicht.

Der Benzodiazepin-Urintest wird in einer Packung mit 25 Kassetten und 25 Pipetten verkauft. Unsere Tests sind mehr als 16 Monate haltbar.

Alle unsere Drogentests werden in Frankreich hergestellt und unterliegen strengen Qualitätskontrollen. Sie entsprechen vollständig den europäischen Anforderungen und sind mit dem CE-Zeichen versehen, um Ihnen einwandfreie Qualität und Präzision zu garantieren.

Bitte beachten Sie, dass die **Benzodiazepin-Urintests** ausschließlich für Fachleute im Bereich Prävention und für Unternehmen in Europa bestimmt sind.