

Urintests auf Methamphetamin (MET) – Packungen mit 25 Tests

Reference: P9263



Dieser **Urintest auf Methamphetamin** ermöglicht den Nachweis von Methamphetamin. Er wird in Frankreich hergestellt und in Packungen zu 25 Tests verkauft.

Herstellungsland: Frankreich

Lagerbestand verfügbar: Unbegrenzt: Produktion auf Anfrage

Zollcode: 3822000000

Länge: 13 cm

Menge pro Karton: 54

Zusammensetzung: Kunststoff

Breite: 17 cm

Höhe: 10 cm

Stückgewicht: 247 g

Produktverpackung: Karton

Verbrauchsdatum: Mehr als 16 Monate

Normen und Zertifikate: CE

Anwendungshinweise: 1- Prendre l'urine du patient dans un flacon. 2- Le sachet en aluminium doit être ouvert à température ambiante. Il faudra ensuite le retirer de son sachet et l'utiliser immédiatement. 3- Vous disposez de 3 puits, mettre 3 gouttes dans chacun d'entre eux. 4- Attendre 5 minutes et lire le résultat. Au-delà de 10 minutes, ne pas prendre en compte l'apparition d'une bande. 5- Si deux lignes apparaissent au niveau de la zone de contrôle : le test est négatif. Si aucune bande colorée n'apparaît au niveau de la zone test (T) : le test est positif. Si aucune bande n'apparaît, ou seulement celle située au niveau de la zone de test (T) : le test est non significatif.



Methamphetamin (abgekürzt MET) ist eine gefährliche und stark suchterzeugende Droge. Sie wird in der Regel in Partykreisen konsumiert, entweder in Form von Kristallen, die geraucht werden, oder in Form von Pillen, die eingenommen werden. Methamphetamin versetzt den Konsumenten in einen Zustand der Euphorie. Seine Wirkung ähnelt der von Kokain.

Im Hinblick auf die Prävention in Unternehmen und die Überwachung im medizinischen Bereich bieten wir Ihnen einen **Methamphetamin-Urintest** zum Nachweis dieser Substanz an. Dieser Test basiert auf einer qualitativen immunochromatographischen Methode, bei der nach dem Prinzip der Konkurrenz das Vorhandensein von MET-spezifischen Antikörpern in einer Urinprobe nachgewiesen wird.

Der **Methamphetamin-Urintest** wird in Kartons zu 25 Einheiten (Kassetten und Pipetten) geliefert und in Frankreich nach einem strengen Qualitätsverfahren hergestellt. Er entspricht den europäischen Vorschriften und trägt das CE-Zeichen, das ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Sicherheit garantiert. Die Gültigkeitsdauer des Tests beträgt mehr als 16 Monate.

Dieser Test ist ein zuverlässiges und schnelles Instrument für toxikologische Screening-Programme, die Nachsorge in der Suchtmedizin oder die Risikoprävention in Berufsfeldern mit hoher Verantwortung (Transport, Industrie, Sicherheit usw.).

Weitere Informationen finden Sie in der von Santé publique France (Februar 2019) veröffentlichten Tabelle zur Nachweisdauer von Drogen. Dieses Dokument weist darauf hin, dass die Nachweisdauer aufgrund verschiedener individueller Faktoren variieren kann.