

Buprenorphin-Urintest (BUP) – Packungen mit 25 Tests

Reference: P9265



Schachtel mit 25 Urintests auf Opiate zum Nachweis von BUP: Buprenorphin. Test hergestellt in Frankreich.

Herstellungsland: Frankreich

Lagerbestand verfügbar: Unbegrenzt: Produktion auf Anfrage

Zollcode: 38220000

Länge: 13 cm

Zusammensetzung: Kunststoff

Breite: 17 cm

Höhe: 10 cm

Stückgewicht: 247 g

Produktverpackung: Karton

Verbrauchsdatum: Mehr als 16 Monate

Normen und Zertifikate: CE

Anwendungshinweise: 1- Prendre l'urine du patient dans un flacon. 2- Le sachet en aluminium doit être ouvert à température ambiante. Il faudra ensuite le retirer de son sachet et l'utiliser immédiatement. 3- Vous disposez de 3 puits, mettre 3 gouttes dans chacun d'entre eux. 4- Attendre 5 minutes et lire le résultat. Au-delà de 10 minutes, ne pas prendre en compte l'apparition d'une bande. 5- Si deux lignes apparaissent au niveau de la zone de contrôle : le test est négatif. Si aucune bande colorée n'apparaît au niveau de la zone test (T) : le test est positif. Si aucune bande n'apparaît, ou seulement celle située au niveau de la zone de test (T) : le test est non significatif.



Buprenorphin ist ursprünglich ein Medikament, das als Schmerzmittel und zur Behandlung von

Opioidabhängigkeit eingesetzt wird. Seine Verwendung ist in Frankreich zugelassen, unterliegt jedoch einer ärztlichen Verschreibung und einem speziellen Nachsorgeprotokoll im Rahmen einer Entziehungskur.

BUP enthält einen Wirkstoff, der eine starke Abhängigkeit von der Substanz hervorruft. Es gilt nicht als Betäubungsmittel, aber sein intensiver Konsum kann mit den gleichen Auswirkungen wie eine Droge verglichen werden. Buprenorphin wird oft auf dem Schwarzmarkt verkauft und intravenös injiziert. Es wird auch geraucht und inhaliert.

BUP kann sehr gefährlich werden und Herz- und Atemprobleme verursachen. Um die Sicherheit aller angesichts dieser Sucht zu gewährleisten, bieten wir Ihnen BUP-Urintests an, um das Vorhandensein dieser Substanz im Körper nachzuweisen. Unsere Tests sind schnell, Sie erhalten die Ergebnisse innerhalb von 5 Minuten. Sie werden in Packungen zu 25 Kassetten und 25 Pipetten verkauft.

Dieser Test wird in Frankreich hergestellt und unterliegt strengen Qualitätskontrollen. Er entspricht vollständig den europäischen Anforderungen und verfügt über die CE-Kennzeichnung, die eine einwandfreie Qualität und Genauigkeit garantiert.

Die Tests werden in ganz Europa ausschließlich an Fachleute im Bereich Prävention und an Unternehmen vertrieben.

Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle zur Nachweisbarkeit von Drogen. Sie wurde im Februar 2019 von „Santé publique“ veröffentlicht. Beachten Sie, dass die Daten in dieser Tabelle allgemeiner Natur sind und die Dauer der Nachweisbarkeit einer Droge von Person zu Person variiert.