

Methadon-Urintest (MTD) – Packungen mit 25 Tests

Reference: P9266



Schachtel mit 25 Urintests zum Nachweis eines übermäßigen Konsums von Methadon (MTD) im Körper.

Herstellungsland: Frankreich

Lagerbestand verfügbar: Unbegrenzt: Produktion auf Anfrage

Zollcode: 38220000

Länge: 13 cm

Zusammensetzung: Kunststoff

Breite: 17 cm

Höhe: 10 cm

Stückgewicht: 247 g

Produktverpackung: Karton

Normen und Zertifikate: CE

Anwendungshinweise: Etape 1 : Collecter une partie de l'urine du patient dans un flacon. Etape 2 : Laisser reposer le sachet en aluminium à température ambiante avant de l'ouvrir. Retirer le test de son emballage et l'utiliser instantanément. Etape 3 : Apposer 3 gouttes de l'urine dans chaque puits. Etape 4 : Lire le résultat après 5 minutes. Ne plus tenir compte de l'apparition d'une bande au delà de 10 minutes.



Methadon ist ein verschreibungspflichtiges Medikament in Form von Sirup oder Kapseln, das Heroin- oder anderen Opiatabhängigen hilft, ihre Sucht zu überwinden. Langfristig reduziert es den illegalen Konsum stärkerer Drogen und beseitigt das Risiko von Ansteckungen und Infektionen, die durch verschmutzte Spritzen übertragen werden. Eine schrittweise Verringerung der verschriebenen Dosen erfolgt erst nach mehreren Jahren der Behandlung.

Da **Methadon** stark abhängig macht, besteht auch ein hohes Risiko einer Überdosierung, wenn der Konsument körperliche Entzugserscheinungen verspürt. In diesem Fall ist der Konsum dieser Substanz



gefährlich und es können schädliche Auswirkungen auftreten: starke Schläfrigkeit (extrem gefährlich beim Autofahren), Verstopfung, sexuelle Funktionsstörungen, Schweißausbrüche, Gewichtszunahme, Amenorrhö, Apathie und Schlaflosigkeit.

Verfallsdatum des Tests: mehr als 16 Monate

Auswertungszeit: 5 Minuten

Urintest Version 1 Droge, pro Packung 25 Kassetten und 25 Pipetten.

Alle unsere Drogentests werden in Frankreich hergestellt und unterliegen strengen Qualitätskontrollen. Sie entsprechen vollständig den europäischen Anforderungen und sind mit dem CE-Zeichen versehen, um Ihnen einwandfreie Qualität und Präzision zu garantieren.

Diese Drogentests werden in ganz Europa ausschließlich an Fachleute im Bereich Prävention und an Unternehmen vertrieben.

Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle zur Dauer der Nachweisbarkeit von Drogen. Sie wurde im Februar 2019 von „Santé publique“ veröffentlicht. Beachten Sie, dass die Daten in dieser Tabelle allgemeiner Natur sind und die Dauer der Nachweisbarkeit einer Droge von Person zu Person variiert.