

## Urintest auf Amphetamine (AMP) – Packungen mit 25 Tests

Reference: P9267



Schachtel mit 25 Amphetamin-Urintests, einfach in der Anwendung und Auswertung.



Herstellungsland: Frankreich

Lagerbestand verfügbar: Unbegrenzt: Produktion auf Anfrage

Zollcode: 38220000

Länge: 13 cm

Zusammensetzung: Kunststoff

Breite: 17 cm

Höhe: 10 cm

Stückgewicht: 247 g

Produktverpackung: Karton

Verbrauchsdatum: Mehr als 16 Monate

Normen und Zertifikate: CE

Anwendungshinweise: Lire attentivement la notice avant utilisation.1. Recueillir l'urine du patient dans un flacon.2. Une fois le sachet d'aluminium revenu à température ambiante, retirer le test de son sachet et l'utilisé immédiatement.3. Déposer dans le puits trois gouttes d'urines.4. Lire les résultats du test après 5 minutes. Au delà de 10 minutes, ne pas tenir compte du résultat.



Für medizinisches Fachpersonal, das Drogentests in Unternehmen, Vereinen, Organisationen oder im Rahmen von Präventionsmaßnahmen durchführt, ist die Schachtel mit 25 Amphetamin-Urintests ideal.

Diese in Frankreich hergestellten und CE-zertifizierten Tests ermöglichen es, innerhalb von 5 Minuten das mögliche Vorhandensein von Amphetamin im Urin nachzuweisen. Diese immunochromatographischen Kassettentests entsprechen den strengen europäischen Qualitätsanforderungen.

Dieses Betäubungsmittel in Form von Tabletten, Pulver oder Kristallen hat appetitzügelnde und psychoanaleptische Wirkungen. Obwohl sie für bestimmte Behandlungen von ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung) verwendet werden, können Amphetamine süchtig machen und sogar gefährlich sein. Schlaflosigkeit, Fieber, Angstzustände, Akne...

Mit einem Amphetamin-Urintest lässt sich das Vorhandensein dieses Rauschmittels im Körper nachweisen und so jegliches Suchtrisiko vermeiden.

## **Urintest Version 1 Droge, pro Packung mit 25 Kassetten und 25 Pipetten.**

*Alle unsere Drogentests werden in Frankreich hergestellt und unterliegen strengen Qualitätskontrollen. Sie entsprechen vollständig den europäischen Anforderungen und sind mit dem CE-Zeichen versehen, um Ihnen einwandfreie Qualität und Präzision zu garantieren.*

***Diese Drogentests werden in ganz Europa ausschließlich an Fachleute im Bereich Prävention und an Unternehmen vertrieben.***

Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle zur Dauer der Nachweisbarkeit von Drogen. Sie wurde im Februar 2019 von „Santé publique“ veröffentlicht. Beachten Sie, dass die Daten in dieser Tabelle allgemeiner Natur sind und die Dauer der Nachweisbarkeit einer Droge von Person zu Person variiert.