


## Urintest Kokain (COC) – Packungen mit 25 Tests

Reference: P9268

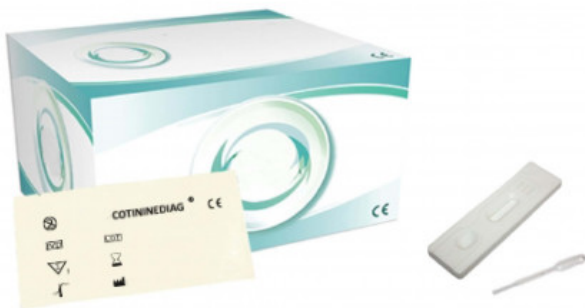

Schachtel mit 25 **Urintests für Kokain** zum Nachweis von **Kokain im Urin**. Unsere Tests werden in Frankreich hergestellt.

Herstellungsland: Frankreich

Lagerbestand verfügbar: Unbegrenzt: Produktion auf Anfrage

Zollcode: 38220000

Länge: 13 cm

Menge pro Karton: 54

Zusammensetzung: Kunststoff

Breite: 17 cm

Höhe: 10 cm

Stückgewicht: 247 g

Produktverpackung: Karton

Verbrauchsdatum: Mehr als 16 Monate

Normen und Zertifikate: CE

Anwendungshinweise: 1- Prendre l'urine du patient dans un flacon. 2- Le sachet en aluminium doit être ouvert à température ambiante. Il faudra ensuite le retirer de son sachet et l'utiliser immédiatement. 3- Vous disposez de 3 puits, mettre 3 gouttes dans chacun d'entre eux. 4- Attendre 5 minutes et lire le résultat. Au-delà de 10 minutes, ne pas prendre en compte l'apparition d'une bande. 5- Si deux lignes apparaissent au niveau de la zone de contrôle : le test est négatif. Si aucune bande colorée n'apparaît au niveau de la zone test (T) : le test est positif. Si aucune bande n'apparaît, ou seulement celle située au niveau de la zone de test (T) : le test est non significatif.



Kokain ist ein Betäubungsmittel, das zu einer starken Abhängigkeit führen kann. Sein Konsum ist in

Frankreich verboten, dennoch ist es nach Cannabis die am zweithäufigsten konsumierte Droge. Der Konsum nimmt im Laufe der Jahre stetig zu, was darauf zurückzuführen ist, dass der Preis immer erschwinglicher wird. Kokain wirkt sehr schnell auf den menschlichen Körper, die Reaktionszeit beim Schnupfen von Kokain wird auf zwei Minuten geschätzt. Diese Zeit verlängert sich, wenn es oral eingenommen oder injiziert wird. Wie bei allen Drogen kann es schnell zu einer Abhängigkeit von Kokain kommen. Schon wenige Konsume reichen aus, um abhängig zu werden. Kokain verursacht dann ein Gefühl der Müdigkeit und führt zu Stimmungsschwankungen. Es kann dann gefährlich werden und Halluzinationen, Schlaganfälle oder Herz-Kreislauf-Unfälle verursachen. Bei Drivecase bieten wir Ihnen **Urintests auf Kokain** an, mit denen das Vorhandensein von **Kokain im Urin** einer Person nachgewiesen werden kann. Es ist zu beachten, dass **Kokain im Urin** bei gelegentlichem Konsum 2 bis 4 Tage lang und bei regelmäßigen Konsumenten 10 bis 14 Tage lang nachweisbar bleibt. Die Auswertungszeit des **Kokain-Tests** beträgt 5 Minuten und seine Haltbarkeitsdauer mehr als 16 Monate. Unser **Kokain-Urintest** wird in einer Packung mit 25 Kassetten und 25 Pipetten verkauft. Er wird in Frankreich hergestellt und unterliegt strengen Qualitätskontrollen. Er verfügt über die CE-Kennzeichnung, die für einwandfreie Qualität und Präzision bürgt.

Unsere **Kokain-Tests** sind ausschließlich für Präventionsfachleute und Unternehmen in Europa bestimmt. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle zur Nachweisbarkeit von Drogen. Sie wurde im Februar 2019 von „Santé publique“ veröffentlicht. Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Daten in dieser Tabelle um allgemeine Angaben handelt und die Dauer der Nachweisbarkeit einer Droge von Person zu Person variiert.