

MDMA-Urintest – Packung mit 25 Tests

Reference: P9270



Packung mit 25 Urintests zum Nachweis von MDMA (Methylenedioxyamphetamin). Test hergestellt in Frankreich.

Herstellungsland: Frankreich
Lagerbestand verfügbar: Unbegrenzt: Produktion auf Anfrage
Zollcode: 38220000
Länge: 13 cm
Zusammensetzung: Kunststoff
Breite: 17 cm
Höhe: 10 cm
Stückgewicht: 247 g
Produktverpackung: Karton
Verbrauchsdatum: Mehr als 16 Monate
Normen und Zertifikate: CE
Anwendungshinweise: 1- Prendre l'urine du patient dans un flacon.2- Le sachet en aluminium doit être ouvert à température ambiante. Il faudra ensuite le retirer de son sachet et l'utiliser immédiatement.3- Vous disposez de 3 puits, mettre 3 gouttes dans chacun d'entre eux.4- Attendre 5 minutes et lire le résultat. Au-delà de 10 minutes, ne pas prendre en compte l'apparition d'une bande.5- Si deux lignes apparaissent au niveau de la zone de contrôle : le test est négatif.Si aucune bande colorée n'apparaît au niveau de la zone test (T) : le test est positif.Si aucune bande n'apparaît, ou seulement celle située au niveau de la zone de test (T) : le test est non significatif.



Methylenedioxyamphetamin, besser bekannt unter dem Namen Ecstasy , ist ein Betäubungsmittel,

das für den Menschen sehr gefährlich sein kann. Seine Verwendung war im Rahmen der Psychiatrie zugelassen, ist nun aber für den Handel und Konsum verboten.

MDMA hat toxische Wirkungen wie Hyperthermie, Paranoia und sogar psychische Probleme. Es wird regelmäßig als Droge konsumiert und macht stark abhängig. Langfristig kann MDMA zu Leberproblemen bis hin zur Zirrhose führen.

Es ist zu beachten, dass ein herkömmlicher Urintest nicht unbedingt das Vorhandensein von Methylenstoffmethamphetamin nachweist. Deshalb bieten wir Ihnen einen Urintest an, mit dem MDMA schnell nachgewiesen werden kann. In nur 5 Minuten wissen Sie, ob das Ergebnis positiv oder negativ ist.

Unser Test ist zudem einfach durchzuführen. Unsere Tests sind immunochromatographische Kassettentests und basieren auf einer Wettbewerbsmethode, mit der ein spezifischer Antikörper identifiziert werden kann.

Unsere Tests sind mehr als 16 Monate lang gültig und werden in Packungen mit 25 Kassetten und 25 Pipetten verkauft. Sie werden in Frankreich hergestellt und tragen das CE-Zeichen, das für einwandfreie Qualität und Präzision bürgt. Diese Urintests entsprechen den europäischen Anforderungen und unterliegen einem sehr strengen Qualitätskontrollverfahren.

Bitte beachten Sie, dass diese Tests in Europa nur an Fachleute im Bereich Prävention und an Unternehmen vertrieben werden.

Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle zur Dauer der Nachweisbarkeit von Drogen. Sie wurde im Februar 2019 von „Santé publique“ veröffentlicht. Beachten Sie, dass die Daten in dieser Tabelle allgemeiner Natur sind und die Dauer der Nachweisbarkeit einer Droge von Person zu Person variiert.