

Urintest auf Methadon-Metaboliten (EDDP) – Packungen mit 25 Tests

Reference: P9285



Schachtel mit 25 CE-konformen Urintests zum Nachweis eines übermäßigen Vorhandenseins des Methadon-Metaboliten (EDDP) im Körper des Patienten.

Unsere Urinteststreifen unterliegen strengen Qualitätskontrollen, um Ihnen eine hervorragende Qualität und echte Zuverlässigkeit zu garantieren.

Herstellungsland: Frankreich

Lagerbestand verfügbar: Unbegrenzt: Produktion auf Anfrage

Zollcode: 38220000

Länge: 13 cm

Zusammensetzung: Kunststoff

Breite: 17 cm

Höhe: 10 cm

Stückgewicht: 221 g

Produktverpackung: Karton

Verbrauchsdatum: Mehr als 16 Monate

Normen und Zertifikate: CE

Anwendungshinweise: Etape 1 : Collecter une partie de l'urine du patient dans un flacon. Etape 2 : Laisser reposer le sachet en aluminium à température ambiante avant de l'ouvrir. Retirer le test de son emballage et l'utiliser instantanément. Etape 3 : Apposer 3 gouttes de l'urine dans chaque puits. Etape 4 : Lire le résultat après 5 minutes. Ne plus tenir compte de l'apparition d'une bande au delà de 10 minutes.



Methadon ist ein Substitutionsmedikament, das zur Behandlung von Patienten eingesetzt wird, die sich von ihrer Opiatabhängigkeit entwöhnen.

EDDP ist der Metabolit von Methadon: Mit anderen gesagt, es handelt sich um das Molekül, das entsteht, nachdem der menschliche Organismus das Grundmolekül des Methadons verändert hat, um es aus dem menschlichen Körper ausscheiden zu können. Dieser Metabolit ist im Urin nachweisbar.

Somit ist EDDP ein zuverlässigerer Marker als Methadon selbst bei der Überwachung von Patienten in Substitutionsbehandlung. Tatsächlich hängt die Ausscheidung von Methadon im Urin von mehreren Parametern ab: Ein negatives Ergebnis bedeutet daher nicht zwangsläufig, dass die Behandlung nicht eingehalten wurde. Darüber hinaus ermöglicht die Messung von EDDP die Aufdeckung von Betrugsfällen durch Zugabe von Methadon zum Urin.

Die Durchführung eines Urindrogentests ist nützlich, um das Vorhandensein von übermäßigem Methadon im Körper nachzuweisen. Da Methadon als Substitutionsmittel für harte Drogen eingesetzt wird, neigen Patienten, die unter Entzugserscheinungen leiden, dazu, Methadon zu überdosieren. Eine Überdosierung führt bei den Konsumenten zu starker Schläfrigkeit (extrem gefährlich beim Autofahren), Verstopfung, sexuellen Funktionsstörungen, Schwitzen, Gewichtszunahme, Amenorrhö, Apathie und Schlaflosigkeit.

Holen Sie sich unsere Urindrogentests immunochromatographische auf Kassette, die schnell anzuwenden und einfach zu interpretieren sind.

Verfallsdatum des Tests: über 16 Monate

Auswertungszeit : 5 Minuten

Urintest Version 1 Droge, pro Box mit 25 Kassetten und 25 Pipetten.

Alle unsere Drogentests werden in Frankreich hergestellt und unterliegen strengsten Qualitätskontrollen. In völliger Übereinstimmung mit den europäischen Anforderungen tragen sie das CE-Zeichen, um Ihnen eine einwandfreie Qualität und Präzision zu garantieren.

Diese Drogentests werden in ganz Europa ausschließlich an Fachleute im Bereich Prävention und an Unternehmen vertrieben.