

## Alcotest 5000® Dräger berührungslos

Reference: P9351



Der Alkoholtester 5000® von Dräger ist ein berührungsloser elektronischer Alkoholtester, mit dem sich der Alkoholgehalt im Blut einer großen Anzahl von Personen in kurzer Zeit überprüfen lässt.

Herstellungsland: Deutschland

Lagerbestand verfügbar: Verfügbar

Länge: 63 cm

Zusammensetzung: Plastique ABS

Breite: 41 cm

Höhe: 219 cm

Stückgewicht: 245 g




Normen und Zertifikate: CE

Normen und Zertifikate: NF EN 60068-2-27

Normen und Zertifikate: NF EN 60068-2-6

Normen und Zertifikate: NF EN 60068-2-64

Anwendungshinweise: 1. La personne testée doit respirer régulièrement et calmement avant la prise de l'échantillon. 2. La personne testée doit être capable d'expirer le volume d'air minimal. 3. Pour que le test soit valide, la personne doit souffler sans interruption pendant au moins 1 seconde (paramètres d'usine). 4. La distance entre l'entonnoir et la bouche de la personne testée doit être d'environ 2-3 cm. 5. Attendez au moins 10 minutes après avoir bu de l'alcool, pour effectuer le test. 6. Le rinçage de la bouche avec de l'eau ou une boisson non alcoolisée ne réduit pas ce délai ! 7. L'alcool résiduel présent dans la bouche ou les boissons aromatisées (ex : jus de fruit), les sprays buccaux contenant de l'alcool ainsi que certains médicaments peuvent fausser la mesure.

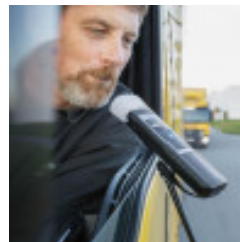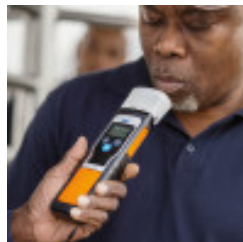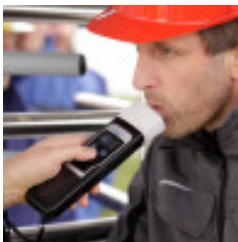

Der Alkoholtester Dräger 5000® ist ein weltweit einzigartiges Gerät zur Alkoholkontrolle. Dieser berührungslose elektronische Alkoholtester ist in der Lage, Alkohol in der Ausatemluft einer Person nachzuweisen.

Der Alkoholtester 5000® Draeger kann in verschiedenen beruflichen Umgebungen, in Fabriken, am Eingang eines Flughafens oder auf einer Baustelle eingesetzt werden und ermöglicht die Überprüfung von bis zu 12 Personen pro Minute. Der Einsatz dieses Alkoholtestgeräts im beruflichen Umfeld trägt somit zur Verringerung von Berufsrisiken und damit von Arbeitsunfällen bei, die durch eine alkoholisierte Person verursacht werden können.

## Wie funktioniert der Alcotest 5000® Dräger?

Der Alkoholtester 5000® Draeger ist ein berührungsloses Testgerät. Um eine Person zu testen, muss diese lediglich aus einer Entfernung von 2 bis 3 cm in den Kegel des Alkoholtestgeräts blasen, ohne diesen mit dem Mund zu berühren. Der austauschbare Kegel leitet die ausgeatmete Luft seitlich ab, sodass sie nicht zum Gesicht der getesteten Person zurückströmen kann. Dank seines elektrochemischen Sensors DrägerSensor® liefert dieses Alkoholtestgerät ein schnelles Ergebnis, indem es auf seinem Display anzeigt und ein akustisches Signal ausgibt, ob „ja“ oder „nein“ Alkohol im Körper der getesteten Person vorhanden ist. Da dieser Alkoholtester keinen genauen Alkoholgehalt anzeigt, können Sie diesen mit anderen chemischen oder elektronischen Alkoholtestgeräten ermitteln.

Mit selbsterklärenden Tasten, einem Beleuchtungssystem mit roten oder grünen LEDs, einer Handschlaufe und rutschfesten Kanten ist der Alkoholtester 5000® Dräger für eine einfache und schnelle Anwendung konzipiert.

Der Alcotest 5000® Dräger wird mit 3 Batterien, 3 Mundstücke, einer Handschlaufe, einer Schutzhülle und einer Gebrauchsanweisung geliefert.

Für schnelle und umfassende Kontrollen ist der Alcotest 5000® Dräger daher ideal, um die Unfallrate in Unternehmen und im Straßenverkehr zu senken.

Die Neukalibrierung des alcotest 5000® Dräger muss alle 24 Monate durchgeführt werden.

## Technische Informationen:

- Der alcotest 5000® Dräger wird mit 3 AA-Batterien à 1,5 V (im Lieferumfang enthalten) betrieben. Mit 3 AA-Batterien können 5000 Tests durchgeführt werden.
- Die Anzeige der Ergebnisse erfolgt nach ca. 2 s (von 0 bis 0,029 mg/l) und nach ca. 6 s (bei z. B. 0,5 mg/l, bei Raumtemperatur).
- Verwendetes Messprinzip: elektrochemischer DrägerSensor®, speziell für Alkohol
- Messbereich: von 0 bis 0,029 mg/l → das Symbol „✓“ zeigt an, dass kein Alkohol vorhanden ist, und das Ergebnis wird durch die grüne LED-Anzeige hervorgehoben. Ab 0,030 mg/l → Das Symbol „X“ zeigt an, dass Alkohol vorhanden ist, und das Ergebnis wird durch die rote LED-Anzeige besser sichtbar gemacht. Ab 2,5 mg/l → außerhalb des Testbereichs (↑ ↑ ↑).

Es wird empfohlen, das Gerät einmal jährlich neu zu kalibrieren.

Benötigen Sie zusätzliche Mundstücke? Entdecken Sie unser 10er-Pack Kegel für Alcotest 5000® Dräger !