

20 Speicheltests 5 Drogen Dräger

Reference: P9357



Der Dräger DrugCheck® 3000 Drogentest dient zum Nachweis von Betäubungsmitteln im Körper. Er liefert Ihnen in nur wenigen Minuten zuverlässige Ergebnisse.

Eine Packung enthält 20 Speicheltests.

Herstellungsland: Deutschland

Lagerbestand verfügbar: + 1 000 Einheiten

Länge: 5.7 cm

Breite: 3.2 cm

Höhe: 11.1 cm

Stückgewicht: 30 g

Normen und Zertifikate: CE

Anwendungshinweise: Stockage/Transport : de 4 °C à 25 °C



Der kompakte und schnelle Speicheldrogentest Dräger DrugCheck® 3000 liefert zuverlässige Ergebnisse und ist dabei äußerst einfach in der Anwendung. Dieser nicht-invasive Speicheldrogentest benötigt keine Stromversorgung und kann überall eingesetzt werden. Damit ist der Dräger DrugCheck® 3000 auch in Risikobereichen oder für Analysen außerhalb des Labors sicher einsetzbar. Er ist leicht zu transportieren, schnell einsatzbereit und bietet eine große Flexibilität bei der Verwendung unter verschiedenen Umständen, insbesondere bei Verkehrskontrollen und Sicherheitstests am Arbeitsplatz. Dieser hygienische Speicheldrogentest ist zum einmaligen Gebrauch bestimmt und verhindert jegliche Manipulation der Ergebnisse.

Dräger DrugCheck® 3000 besteht aus zwei Komponenten: einem absorbierenden Sammelbehälter zur Entnahme einer Speichelprobe und einer Testkassette für die Analyse. Die Testkassette enthält die Pufferlösung sowie ein Lesefenster mit zwei Teststreifen, die die Kontroll- und Testlinien anzeigen.

Welche Drogen erkennt der Speicheltest Dräger DrugCheck® 3000 nachweisen?

Der Dräger DrugCheck® 3000 ermöglicht den Nachweis von fünf Substanzen

gleichzeitig: Cannabis, Amphetamine, Methamphetamin, Kokain und Opiate. Auf der Liste der als Betäubungsmittel eingestuft Substanzen ist Cannabis die am häufigsten konsumierte Droge, deren Bestandteile am schwierigsten zu identifizieren sind. Aus diesem Grund wurde der Dräger DrugCheck® 3000 speziell für den Nachweis von THC optimiert. Der Test bietet Ihnen zwei Messoptionen: Je nach gewählter Wartezeit (Vorinkubation) des Tests gibt es eine Schnelloption mit einem hohen THC-Nachweisgrenzwert und eine empfindlichere Option mit einem niedrigeren Grenzwert.

Wie wird der Speicheldrogentest Dräger DrugCheck® 3000 durch?

Dieser erfolgt in drei einfachen Schritten:

1. Entnehmen Sie mit dem Speichelsammler eine Speichelprobe und geben Sie diese in den Trichter.
2. Schütteln Sie das Testkit und warten Sie kurz, bis die Inkubation abgeschlossen ist.
3. Starten Sie die Testanalyse.

Die Testdauer beträgt insgesamt zwischen drei und fünf Minuten.

Wie ist das Ergebnis des Speicheldrogentests

Wenn die Kontrolllinien im Fenster erscheinen, können die Ergebnisse abgelesen werden.

- Wenn neben der entsprechenden Droge eine Linie erscheint, ist der Test negativ. In der Probe wurde keine der Zielsubstanzen nachgewiesen. - Wenn neben einer Substanz keine Linie angezeigt wird, ist das Ergebnis für diese Droge positiv.

Die Anwendung Dräger DrugCheck® 3000 zur Analyse der Speicheltestergebnisse

Mit der App DrugCheck von Dräger® können Sie Ihre Testergebnisse in wenigen Schritten einfach scannen, analysieren, speichern und archivieren. Videoanleitungen führen Sie durch die Verwendung des Tests, von der Analyse der Testergebnisse mit der Kamera Ihres Smartphones bis zur Speicherung der Daten für die spätere Verwendung.

Sie können die Ergebnisse zusammen mit den persönlichen Daten der getesteten Person, des Testers und Informationen wie Datum, Uhrzeit und Ort des Tests speichern. Die gespeicherten Daten ermöglichen es Ihnen, die generierten Testergebnisse später einzusehen. Die verschlüsselten Daten können schnell und einfach mit einem Smartphone übertragen werden. So können Sie auch aus der Ferne Maßnahmen auf der Grundlage der Testergebnisse empfehlen. Die App kann kostenlos im App Store und im Google Play Store für iOS- und Android-Betriebssysteme heruntergeladen werden.

Eine Packung enthält 20 Speicheltests.