

THC-Speicheltest (Cannabis) 15 ng/ml

Reference: P5047



THC

Unser **THC-Speicheltest** weist das Vorhandensein der Substanz im Körper auf einfache, schnelle und präzise Weise nach. Dieser Test ist normiert und mit dem UAF-Label (von der französischen Armee verwendet) ausgezeichnet.

Herstellungsland: Frankreich

Lagerbestand verfügbar: + 10.000 Einheiten

Zollcode: 3822000000

Länge: 15.5 cm

Menge pro Karton: 1350

Zusammensetzung: Kunststoff

Breite: 6.5 cm

Höhe: 6.5 cm

Stückgewicht: 7.0000

Produktverpackung: Karton

Produktverpackung: Aluminiumbeutel

Verbrauchsdatum: + 20 Monate

Normen und Zertifikate: CE

Anwendungshinweise: 1. Ouvrir le sachet en aluminium, sortir le test et retirer le bouchon. 2. Pour accélérer le processus de collecte, bouger la langue d'un côté à l'autre de la bouche pour accumuler la salive avant de commencer. Déposer la partie absorbante de goût légèrement mentholé du test sous la langue, tout en tenant le test incliné vers le haut et attendre de voir le front de migration atteindre la ou les lignes de contrôle (C). 3. Déposer le test sur une surface plane et propre. Déclencher le chronomètre. 4. Détacher la bandelette adhésive pour révéler les résultats qui apparaissent à partir de 3 minutes. Confirmer la lecture des résultats au bout de 5 minutes. Ne pas lire les résultats au-delà de 15 minutes.



In Frankreich ist Cannabis mit fast 5 Millionen Konsumenten laut der Website Vie-publique die am häufigsten konsumierte Droge, was mehr als 7 % der Bevölkerung entspricht. Cannabis ist daher die sinnvollste Substanz, die bei Sensibilisierungs- und Präventionsmaßnahmen im Zusammenhang mit Suchtrisiken getestet werden sollte.

Der **THC-Speicheltest** wurde entwickelt, um den kürzlichen Konsum von Cannabis nachzuweisen. Er ist ideal, um festzustellen, ob eine Person derzeit unter dem Einfluss von Cannabis steht. Er ermöglicht eine zuverlässige Beurteilung der Fähigkeit einer Person, eine Tätigkeit auszuüben, die Wachsamkeit und Reaktionsfähigkeit erfordert, wie z. B. Autofahren oder die Arbeit an riskanten Arbeitsplätzen.

Zu diesem Zweck entspricht dieser **Cannabis-Speicheltest** dem in Frankreich geltenden offiziellen Nachweisgrenzwert von 15 ng/ml gemäß Artikel 3 des Erlasses vom 13. Dezember 2016. Damit gewährleistet er eine Zuverlässigkeit, die den französischen Vorschriften für Cannabis-Tests entspricht.

Dieser Test ist normiert und entspricht den europäischen Anforderungen (CE-Kennzeichnung) sowie den ISO-Normen 13485. Er verfügt außerdem über das UAF-Label (das von der französischen Armee verwendet wird). Letzteres bescheinigt ein hohes Maß an Qualität und Zuverlässigkeit.

Der **THC-Speicheltest** eignet sich perfekt für den Einsatz vor Ort, sei es in Unternehmen, im medizinischen Bereich oder bei Präventionskontrollen. Er ist einfach zu handhaben, erfordert keine Vorbereitung und kein zusätzliches Material, sodass er schnell und für jedermann zugänglich ist. Aufgrund seiner Konzeption kann er hygienisch durchgeführt werden, wodurch das Kontaminationsrisiko begrenzt wird.

Die Anwendung erfolgt in einem einzigen Schritt: Legen Sie den Teststreifen unter die Zunge und achten Sie darauf, dass er gut mit der Schleimhaut in Kontakt ist, da sich dort das THC-Molekül anlagert. Nach einigen Sekunden, wenn der Streifen gut mit Speichel getränkt ist, legen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche. Das Ergebnis erscheint dann innerhalb von 1 bis 5 Minuten.

Das Ablesen ist ganz einfach. Um die Gültigkeit des Tests zu bestätigen, muss unbedingt die Linie C (Kontrolle) erscheinen. Die Linie T (Test) zeigt dann an, ob THC vorhanden ist oder nicht:

- Wenn die Linie T erscheint → ist der Test negativ
- Wenn die T-Linie nicht erscheint → ist der Test positiv und zeigt einen Cannabiskonsum von weniger als 8 Stunden an.

Zusätzliche Informationen zum Test

- Verfallsdatum des Speicheltests: mehr als 20 Monate
- Nachweisgrenze des Speicheltests für THC: 15 ng/ml
- Auswertungszeit: 1 bis 5 Minuten
- Maximale Nachweiszeit: 1 bis 8 Stunden nach Cannabiskonsum
- Verpackt in Schachteln zu 25 Stück. Nur in Vielfachen von 25 bestellbar.
- Der angegebene Preis ist der Stückpreis (Preis pro Drogentest).

Entdecken Sie in diesem Video Schritt für Schritt, wie Sie den THC-Speicheltest richtig anwenden.