

5-in-1-Speicheltest für mehrere Drogen

Reference: P5048

CE



Der tist ein 5-in-1-Speicheltest für mehrere Drogen und entspricht der Verordnung vom 13. Dezember 2016 (NOR: INTS1637241A). Er ermöglicht einen schnellen, zuverlässigen und diskreten Nachweis von 5 wichtigen Drogen. Er wurde für Fachleute und öffentliche Einrichtungen entwickelt, zeigt die Ergebnisse in nur 1 Minute an und garantiert dank seiner Abdecklasche Vertraulichkeit. Hergestellt in einem Labor in Frankreich.

Der angegebene Preis ist der Stückpreis (Preis pro Drogentest).

Herstellungsland: Frankreich

Lagerbestand verfügbar: + 5.000 Einheiten

Zollcode: 3822000000

Länge: 11.5 cm

Breite: 2 cm

Stückgewicht: 10 g

Produktverpackung: Karton

Produktverpackung: Aluminiumbeutel

Verbrauchsdatum: Mehr als 16 Monate

Normen und Zertifikate: CE

Anwendungshinweise: Placez la bande salivaire sous la langue pendant quelques secondes. Retirez le test et lisez les résultats au bout d'1 minute. Deux lignes indiquent un résultat négatif, une seule ligne indique une détection positive. Utilisez la languette de confidentialité pour masquer le résultat si besoin.





Der Speicheltest für mehrere Drogen wurde für Unternehmen, Behörden und Präventionsfachleute entwickelt. Er ist zuverlässig, schnell und diskret und ermöglicht den Nachweis von 5 wichtigen Substanzen in einem einzigen Schritt.

Hauptmerkmale:

- Ergebnisse bereits 1 Minute nach der Probenentnahme
- 5 nachgewiesene Drogen aus einer Auswahl von 9 verfügbaren Substanzen*
- Einfacher Test in nur einem Schritt
- Vertraulichkeitsstreifen zum Verbergen der Ergebnisse
- Einfache visuelle Auswertung (2 Linien = negativ / 1 Linie = positiv)
- Entspricht dem Erlass AFSP1636875A vom 13. Dezember 2016
- Hergestellt in einem französischen Labor

Inhalt des Kits:

- Einzeln verpackte Tests
- Ausführliche Gebrauchsanweisung
- Schachtel mit 25 Tests

Der Mehrfach-Speicheltest ist so konzipiert, dass er auch ohne spezielle Schulung schnell und einfach anzuwenden ist.

1. Entfernen Sie die Kappe und das Vertraulichkeitsetikett.
2. Entnehmen Sie Speichel, indem Sie die Teststreifen 5 Mal sanft an der Innenseite jeder Wange und dann 5 Mal auf der Zungenoberfläche reiben. (Dauer: 30 Sekunden)
3. Legen Sie dann die Teststreifen unter die Zunge und halten Sie sie mit der Zunge fest, bis ein rosa Streifen erscheint, der die erfolgreiche Probenentnahme anzeigt.
4. Setzen Sie die Kappe wieder auf und warten Sie auf das Ergebnis, das nach 1 Minute sichtbar ist.

Die Auswertung ist einfach:

- Zwei Linien: Test negativ
- Nur eine Linie C: Test positiv
- Keine Linie oder nur Linie T: Test ungültig

Auf jedem Test ist eine übersichtliche visuelle Anleitung aufgedruckt, um eine intuitive und sichere



Auswertung zu gewährleisten.
Warum sollten Sie sich für den 5-Drogen-Test entscheiden?

- Technologie der neuen Generation: schneller, zuverlässiger, praktischer
- Modernisiertes Design und klare visuelle Darstellung für eine einfache Anwendung
- Professionelle Anwendung: geeignet für Unternehmen, Transportunternehmen, Personalabteilungen usw.
- Einhaltung der französischen Vorschriften (Erlass vom 13.12.2016)

Dieser Test kann so konfiguriert werden, dass er bis zu 5 verschiedene Drogen aus den folgenden Substanzen nachweist: THC (Cannabis), Kokain, Opiate, Amphetamine und Methamphetamine.

Die geschätzte Gültigkeitsdauer der Speicheltests (5 Drogen und THC) beträgt 18 Monate.

Mitgelieferte Dokumente: technisches Datenblatt, Gebrauchsanweisung, Konformitätsbescheinigung gemäß Erlass vom 13. Dezember 2016 (auf Anfrage).

Der angegebene Preis ist der Stückpreis (Preis pro Drogentest).