

## THC-Urintests (Cannabis) mit 3 Schwellenwerten (8er-Pack)

Reference: P5055



Packung mit 8 THC-Urintests mit Konzentrationsstufen: niedrig (20 ng/l), mittel (50 ng/l) oder hoch (150 ng/l). Auswertungszeit: 5 Min.

Herstellungsland: Frankreich

Lagerbestand verfügbar: Unbegrenzt: Produktion auf Anfrage

Zollcode: 38220000

Länge: 13 cm

Zusammensetzung: Kunststoff

Breite: 17 cm

Höhe: 10 cm

Stückgewicht: 209 g

Produktverpackung: Karton

Verbrauchsdatum: Mehr als 16 Monate

Normen und Zertifikate: CE

Anwendungshinweise: 1- Prendre l'urine du patient dans un flacon.2- Le sachet en aluminium doit être ouvert à température ambiante. Il faudra ensuite le retirer de son sachet et l'utiliser immédiatement.3- Vous disposez de 3 puits, mettre 3 gouttes dans chacun d'entre eux.4- Attendre 5 minutes et lire le résultat. Au-delà de 10 minutes, ne pas prendre en compte l'apparition d'une bande.5- Si deux lignes apparaissent au niveau de la zone de contrôle : le test est négatif. Si aucune bande colorée n'apparaît au niveau de la zone test (T) : le test est positif. Si aucune bande n'apparaît, ou seulement celle située au niveau de la zone de test (T) : le test est non significatif.



Dieser THC-Urintest ermöglicht den schnellen Nachweis einer niedrigen (20 ng/ml), mittleren (50 ng/ml) oder hohen (150 ng/ml) THC-Konzentration (Cannabis), was die Auswertung der Ergebnisse und die Überwachung des Konsums oder Entzugs erleichtert. Die Anwendung ist sehr einfach und dauert nicht länger als eine Minute. Die Ergebnisse liegen nach 5 Minuten vor.

Diese Urintests werden in Packungen zu 8 Stück zusammen mit einer Gebrauchsanweisung geliefert. Die



Drogentests entsprechen den Normen CE 98/97/EG und werden in Frankreich hergestellt.

**Verfallsdatum des Tests:** mehr als 16 Monate  
Die unten angegebenen Preise gelten für Packungen mit 8 Stück.

Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle zur Dauer der Nachweisbarkeit von Drogen. Sie wurde im Februar 2019 von „Santé publique“ veröffentlicht. Beachten Sie, dass die Daten in dieser Tabelle allgemeiner Natur sind und die Dauer der Nachweisbarkeit einer Droge von Person zu Person variiert.