

## Multidrogen-Urintest (11 in 1) – CE-Normen

Reference: P5057



**Multidrogen-Urintest**, verpackt in Kassettenboxen zu je 8 Stück. Nachgewiesene Drogen: THC, AMP, MDMA, BAR, BZO, MET, BUP, COC, MOP, TCA, MTD. Auswertungszeit: 5 Min.

Herstellungsland: Frankreich  
Lagerbestand verfügbar: Unbegrenzt: Produktion auf Anfrage  
Zollcode: 38220000  
Länge: 13 cm  
Zusammensetzung: Kunststoff  
Breite: 17 cm  
Höhe: 10 cm  
Stückgewicht: 247 g  
Produktverpackung: Karton  
Produktverpackung: Aluminiumbeutel  
Verbrauchsdatum: Mehr als 16 Monate  
Normen und Zertifikate: CE

Drogen	Erkennung	Erkennung
THC	+	+
AMP	+	+
MDMA	+	+
BAR	+	+
BZO	+	+
MET	+	+
BUP	+	+
COC	+	+
MOP	+	+
TCA	+	+
MTD	+	+

Der **Multidrogen-Urintest** ist ein immunochromatographisches Kassettentestgerät, das zum Nachweis **zahlreicher Drogen im Urin** entwickelt wurde und insgesamt 11 verschiedene Substanzen abdeckt.

Diese Drogentests verwenden eine Wettbewerbsmethode, mit der für jede Zieldroge spezifische Antikörper identifiziert werden können.

Diese Drogentests sind speziell für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen gedacht, die interne Drogentests durchführen möchten. Mit dem **Multidrogen-Urintest** lassen sich die in Frankreich am häufigsten konsumierten illegalen Substanzen nachweisen.

Drogentests in Unternehmen sind ein wichtiges Instrument, um Sicherheit, Produktivität und die

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten.

Dank seines Kassettenformats ist der Test einfach anzuwenden.

## Anwendung:

Fangen Sie den Urin des Patienten in einem Fläschchen auf. Nehmen Sie die Kassette aus dem Aluminiumbeutel. Der Beutel ist bei Raumtemperatur zu öffnen. Sobald Sie die Kassette entnommen haben, verwenden Sie sie sofort. Es stehen Ihnen 5 Vertiefungen zur Verfügung. Geben Sie mit einer Pipette (im Kit enthalten) 3 Tropfen in jede Vertiefung und warten Sie 5 Minuten, bevor Sie das Ergebnis ablesen. Nach mehr als 10 Minuten darf das Erscheinen eines Streifens nicht mehr berücksichtigt werden.

So lesen Sie das Testergebnis ab:

Wenn im Kontrollbereich zwei Linien erscheinen: Der Test ist negativ.

Wenn im Testbereich kein Farbstreifen erscheint: Der Test ist positiv.

Wenn kein Streifen erscheint oder nur der im Testbereich: Der Test ist nicht aussagekräftig.

Verfallsdatum des Tests: mehr als 16 Monate

Auswertungszeit: 5 Minuten

**Multidrug-Test 11 in 1**, pro Packung mit 8 Kassetten und 8 Pipetten.

Dieser Test liefert ein vorläufiges Analyseergebnis. Zur Bestätigung des Ergebnisses muss eine chemische Methode angewendet werden.

### Nachgewiesene Drogen:

THC: Cannabis (50 ng/ml), AMP: Amphetamine (300 ng/ml), MDMA: Methylendioxyamphetamin (500 ng/ml), BAR: Barbiturate (300 ng/ml), BZO: Benzodiazepine (300 ng/ml), MET: Methamphetamin (300 ng/ml), BUP: Buprenorphin (10 ng/ml), COC: Kokain (300 ng/ml), MOP: Morphin (300 ng/ml), TCA: Trizyklische Antidepressiva (1000 ng/ml), MTD: Methadon (300 ng/ml)

*Alle unsere Drogentests werden in Frankreich hergestellt und unterliegen strengen Qualitätskontrollen. Sie entsprechen vollständig den europäischen Anforderungen und tragen das CE-Zeichen, um Ihnen einwandfreie Qualität und Präzision zu garantieren. Diese Drogentests werden europaweit an Präventionsfachleute und Unternehmen vertrieben.*

**Die oben angegebenen Preise gelten für Packungen mit 8 Einheiten.**

Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle zur Dauer der Positivität von Drogen. Sie wurde im Februar 2019 von „Santé publique“ veröffentlicht. Beachten Sie, dass die Daten in dieser Tabelle allgemeiner Natur sind und die Dauer der Positivität einer Droge von Person zu Person variiert.