

THC-Urintests (Cannabis) – Schachteln mit 25 Tests

Reference: P5049



THC-Urintest Immunochromatographische Kassettentests zum Nachweis von THC im Urin. Auswertung in 5 Minuten. Drogenschwelle: 50 ng/ml.

Herstellungsland: Frankreich
Lagerbestand verfügbar: Unbegrenzt: Produktion auf Anfrage

Zollcode: 38220000

Länge: 13 cm

Menge pro Karton: 54

Zusammensetzung: Kunststoff

Breite: 17 cm

Höhe: 10 cm

Stückgewicht: 220 g

Produktverpackung: Karton

Normen und Zertifikate: CE

Anwendungshinweise: 1- Prendre l'urine du patient dans un flacon. 2- Le sachet en aluminium doit être ouvert à température ambiante. Il faudra ensuite le retirer de son sachet et l'utiliser immédiatement. 3- Vous disposez de 3 puits, mettre 3 gouttes dans chacun d'entre eux. 4- Attendre 5 minutes et lire le résultat. Au-delà de 10 minutes, ne pas prendre en compte l'apparition d'une bande. 5- Si deux lignes apparaissent au niveau de la zone de contrôle : le test est négatif. Si aucune bande colorée n'apparaît au niveau de la zone test (T) : le test est positif. Si aucune bande n'apparaît, ou seulement celle située au niveau de la zone de test (T) : le test est non significatif.



In risikoreichen Arbeitsumgebungen sind Wachsamkeit und Reaktionsfähigkeit von entscheidender Bedeutung. Der Konsum von Cannabis, selbst wenn er nur gelegentlich erfolgt, beeinträchtigt die Reflexe,

die Konzentration und das Urteilsvermögen, was zu schweren Unfällen führen kann. Aus diesem Grund ist der **THC-Urintest** für Arbeitgeber zu einem wichtigen Präventionsinstrument geworden.

Der **THC-Urintest** ist zuverlässig, schnell und einfach anzuwenden und ermöglicht den Nachweis von Tetrahydrocannabinol (THC), dem wichtigsten psychoaktiven Bestandteil von Cannabis, im Urin. Er identifiziert einen kürzlich erfolgten Konsum und hilft bei der Beurteilung der Fähigkeit eines Mitarbeiters, seine Tätigkeit sicher auszuüben.

Die wichtigsten Merkmale unseres **THC-Urintests** sind:

- Nachweisgrenze bei 50 ng/ml, entspricht den Standards für berufliche Drogentests.
- Schnelle Ergebnisse: Ergebnisse innerhalb weniger Minuten, ohne komplexe Auswertung.
- Einfachheit: hygienisches Kassettenformat, leicht zu handhaben.
- Zuverlässigkeit: immunochromatographische Technologie für einen spezifischen Nachweis von THC.

Um Risiken zu begrenzen, ist der Arbeitgeber berechtigt, einen **Cannabis-Urintest** durchzuführen, wenn eine Stelle ein besonderes Sicherheitsrisiko darstellt. Dazu muss die Möglichkeit, einen Test durchzuführen, in der Betriebsordnung verankert sein. Dieses Screening ist somit ein Instrument zur Prävention von Risikoverhalten im Unternehmen.

Die Einführung eines **THC-Urintests** ermöglicht es Ihnen, Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit Ihrer Mitarbeiter zu ergreifen, das Unfallrisiko zu begrenzen und ein sicheres Arbeitsumfeld zu gewährleisten.

Alle unsere Drogentests werden in Frankreich hergestellt und unterliegen strengen Qualitätskontrollen. Sie entsprechen vollständig den europäischen Anforderungen und sind mit dem CE-Zeichen versehen, um Ihnen einwandfreie Qualität und Präzision zu garantieren.

Die unten angegebenen Preise gelten für Packungen mit 25 Einheiten (einschließlich Kassetten und Pipetten, ohne Urinbecher).

Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle zur Dauer der Positivität von Drogen. Sie wurde im Februar 2019 von „Santé publique“ veröffentlicht. Beachten Sie, dass es sich bei den Daten in dieser Tabelle um allgemeine Angaben handelt und die Dauer der Nachweisbarkeit einer Droge von Person zu Person variiert.