

## Test dépistage antigénique du Covid

Référence P8697

Ce test de dépistage antigénique du coronavirus est un test chromatographique permettant la détection du virus 2019-nCov par un prélèvement nasopharyngé. Tests vendus par boîte de 25, le prix indiqué correspondant au prix d'un test unitaire.

Ces tests covid sont à usage strictement préventif.



Pays de fabrication: Chine

Stock disponible: + 10 000 unités

Code douanier: 3002150090

Longueur: 20.5 cm

Quantité par carton: 100

Largeur: 14 cm

Hauteur: 8.5 cm

Poids unitaire: 345 g

Emballage produit: Boîte Carton

Livraison express ?: Oui

Date limite de consommation: 12 mois

Normes et certificats: Conformité HAS

Conseils d'utilisation: Le kit de test doit être conservé dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. Seuls des professionnels de santé peuvent utiliser ces tests.



Simple d'utilisation le test covid antigénique nasal permet de dépister la Covid-19 en seulement 15 minutes.

**Important : Le test antigénique permet un dépistage précoce du Covid-19. Principe de la méthode : Notre test se lie à l'anticorps anti-SARS-CoV-2 inclus dans la zone de détection, montrant une bande rouge. Lorsque la réaction est terminée, les résultats peuvent être jugés par observation visuelle.**

Mode d'emploi du test antigénique :

Le principe est similaire aux autotest covid

- 1 - Ajoutez 12 gouttes de tampon d'extraction d'échantillon dans le tube de traitement des échantillons.
- 2 - Insérez l'écouvillon dans le tube de traitement des échantillons. Bien mélanger tout en appuyant l'extrémité contre le fond et le côté du tube d'extraction pendant 10-15 secondes.
- 3 - Pour retirer l'écouvillon, appuyer sur les côtés du tube. Essayer de laisser autant de liquide que possible.
- 4 - Insérer fermement l'embout dans le tube d'extraction de l'échantillon. Renverser le tube d'extraction contenant l'échantillon et ajouter 2-3 gouttes d'échantillon, en faisant pression sur le tube de solution extraite, dans le puits réservé à l'échantillon.
- 5 - Attendre que la ou les lignes de couleur apparaisse(nt). Lire le résultat du test après 15 minutes. Ne pas interpréter le résultat après 20 minutes.

Test enregistré sur la plateforme COVID-19 du ministère des solidarités et de la santé.

**Ses caractéristiques :**

- tests covid fournis en kit individuel pour optimiser votre consommation
- compte-gouttes à usage unique fournies avec les tests
- 25 tests (réglettes), 25 écouvillons, 25 tubes à échantillons, 1 flacon de diluant et 1 notice fournies.
  - résultats en 15 min
  - coffrets de 25 kits
- utilisation par un professionnel de santé obligatoire

**Certifications :**

- Marquage CE
- Conformité HAS

**Conservation** et stabilité des tests : **entre 2 et 30°C.**

Avant la réalisation du test, il est conseillé de laisser le test atteindre la température ambiante, entre 15 et 30°C.

Découvrez notre article sur la différence des tests covid.  
Photos non contractuelles.