

Masque chirurgical type 2R (emballé par 10)

Référence P8718



Masque chirurgical à usage unique EN 14683:2019 de type 2R, fabriqués en Europe et emballés par sachet de 10 : idéal pour une distribution.

Pays de fabrication: Bulgarie

Stock disponible: + 400 000 unités

Code douanier: 6307909810

Composition: PP NON WOVEN SPUNBOND 20 GR/M2

Poids unitaire: 175 g

Emballage produit: Boîte Carton

Emballage produit: Polybag

Code EAN: 376032211005

Conseils d'utilisation: Comment porter un masque chirurgical type 2R ? 1. Lavez vous correctement les mains à l'aide de savon et d'eau ou de gel hydroalcoolique. 2. Placez votre masque chirurgical type 2 en le tenant par les élastiques, et placez ces derniers derrière vos oreilles. 3. Assurez-vous que votre masque chirurgical type II recouvre bien votre nez, votre bouche et votre menton. 4. Ajustez votre masque chirurgical type II grâce à sa barrette nasale. 5. Une fois placé, ne touchez plus votre masque. 6. Avant de le retirer, lavez-vous une nouvelle fois les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique. 7. Jetez votre masque chirurgical type 2 dans une poubelle fermée.

Entretien produit: Les instructions de stockage suivantes s'appliquent au produit emballé :

Température ambiante: -20°C à +40°C / Humidité relative: jusqu'à un maximum de 80% / Tenir à l'écart de la saleté, de la poussière et de la lumière directe du soleil. Les masques usagés doivent être éliminés en tant que déchets à risques, si possible conformément aux réglementations locales.

