

Tests drogues urinaires benzodiazépine (BZO) - Boîtes de 25 tests

Référence P9261



Test urinaire benzodiazépine détectant la présence de la substance en 5 minutes. Boîte de 25 tests fabriqués en France et normés CE.

Pays de fabrication: France

Stock disponible: Illimité : production à la demande

Code douanier: 3822000000

Longueur: 13 cm

Quantité par carton: 54

Composition: Plastique

Largeur: 17 cm

Hauteur: 10 cm

Poids unitaire: 247 g

Emballage produit: Sachet aluminium

Date limite de consommation: + de 16 mois

Normes et certificats: CE

Conseils d'utilisation: 1- Prendre l'urine du patient dans un flacon. 2- Le sachet en aluminium doit être ouvert à température ambiante. Il faudra ensuite le retirer de son sachet et l'utiliser immédiatement. 3- Vous disposez de 3 puits, mettre 3 gouttes dans chacun d'entre eux. 4- Attendre 5 minutes et lire le résultat. Au-delà de 10 minutes, ne pas prendre en compte l'apparition d'une bande. 5- Si deux lignes apparaissent au niveau de la zone de contrôle : le test est négatif. Si aucune bande colorée n'apparaît au niveau de la zone test (T) : le test est positif. Si aucune bande n'apparaît, ou seulement celle située au niveau de la zone de test (T) : le test est non significatif.



La benzodiazépine est présente dans certains médicaments prescrits par les médecins. À l'origine, celle-ci a pour objectif de soulager les troubles liés à l'anxiété et au sommeil. Malheureusement, cette substance comporte de forts risques de dépendance. L'arrêt de la benzodiazépine nécessite d'ailleurs un processus de sevrage encadré pour éviter tous effets indésirables que pourrait engendrer le manque.

Pour éviter les risques de dépendance, la durée de traitement conseillée n'excède pas les 12 semaines (période de sevrage comprise) pour traiter l'anxiété et 4 semaines pour traiter l'insomnie.

Hors cadre médical et légal, cette substance est notamment consommée dans le but de procurer des sensations de détente et d'atténuation des émotions.

Dans le cadre professionnel, il est essentiel de détecter une consommation de cette substance car celle-ci pourrait augmenter le risque d'accident. Au volant, elle a pour effet de diminuer la vigilance du conducteur et de le faire somnoler. De même pour les métiers à risques où il est important d'être en pleine possession de ses capacités pour ne pas représenter un risque pour soi ou pour les autres. Plus une personne consomme cette substance, plus elle développera une forte dépendance, des troubles et des effets secondaires associés tels qu'une perte de mémoire, des difficultés dans les mouvements et des insomnies. Ces effets secondaires font d'autant plus accroître le risque d'accident.

Pour déterminer sa présence, notre **test urinaire benzodiazépine** utilise un procédé immunochromatographique. En déposant un échantillon sur une cassette, vous pourrez savoir en l'espace de 5 minutes si une personne est sous son emprise ou non.

Test urinaire benzodiazépine vendu par boîte de 25 cassettes et 25 pipettes. Nos tests ont une date limite d'utilisation de plus de 16 mois.

Tous nos tests de drogues sont fabriqués en France et suivent un cursus de qualité très strict. En totale conformité avec les exigences européennes, ils bénéficient du marquage CE pour vous assurer une qualité et une précision irréprochable.

Attention, les **tests urinaires benzodiazépine** sont réservés uniquement aux professionnels de la prévention et des entreprises en Europe.