

Tests drogues urinaires buprénorphine (BUP) - Boîtes de 25 tests

Référence P9265



Boite de 25 tests urinaire opiacés permettant de détecter la présence de BUP : Buprénorphine. Test fabriqué en France.

Pays de fabrication: France

Stock disponible: Illimité : production à la demande

Code douanier: 38220000

Longueur: 13 cm

Composition: Plastique

Largeur: 17 cm

Hauteur: 10 cm

Poids unitaire: 247 g

Emballage produit: Boîte Carton

Date limite de consommation: + de 16 mois

Normes et certificats: CE

Conseils d'utilisation: 1- Prendre l'urine du patient dans un flacon.2- Le sachet en aluminium doit être ouvert à température ambiante. Il faudra ensuite le retirer de son sachet et l'utiliser immédiatement.3- Vous disposez de 3 puits, mettre 3 gouttes dans chacun d'entre eux.4- Attendre 5 minutes et lire le résultat. Au-delà de 10 minutes, ne pas prendre en compte l'apparition d'une bande.5- Si deux lignes apparaissent au niveau de la zone de contrôle : le test est négatif.Si aucune bande colorée n'apparaît au niveau de la zone test (T) : le test est positif.Si aucune bande n'apparaît, ou seulement celle située au niveau de la zone de test (T) : le test est non significatif.



La buprénorphine est à la base un médicament utilisé comme analgésique et en traitement pour dépendance aux opiacés. Son utilisation est autorisée en France mais soumise à une prescription médicale

et un protocole de suivi particulier dans le cadre d'un sevrage.

La BUP contient une molécule provoquant une forte dépendance à la substance. Elle n'est pas considérée comme un stupéfiant mais son usage intensif peut-être assimilé aux mêmes effets qu'une drogue. La buprénorphine est souvent revendue sur le marché noir et consommée par des injections intraveineuses. Elle est aussi fumée et inhalée.

La BUP peut devenir très dangereuse et provoquer des problèmes cardiaques et respiratoires. Afin d'assurer la sécurité de tous face à cette addiction, nous vous proposons des tests urinaire BUP afin de détecter sa présence dans l'organisme. Nos tests sont rapides, vous obtiendrez les résultats en 5 minutes. Ils sont vendus par boîte de 25 cassettes et 25 pipettes.

Ce test est fabriqué en France et a suivi un cursus de qualité très strict. En totale conformité avec les exigences européennes, il bénéficie du marquage CE assurant une qualité et une précision irréprochable. Tests distribués dans toute l'Europe uniquement auprès des professionnels de la prévention et des entreprises.

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au tableau des durées de positivité des drogues. Il a été publié par « Santé publique » au mois de février 2019. Notez que les données de ce tableau sont générales, la durée de positivité d'une drogue est variable d'un individu à l'autre.