

Tests drogues urinaires amphétamine (AMP) - Boîtes de 25 tests

Référence P9267



Boîte de 25 tests urinaires amphétamines faciles à utiliser et à interpréter.



Pays de fabrication: France

Stock disponible: Illimité : production à la demande

Code douanier: 38220000

Longueur: 13 cm

Composition: Plastique

Largeur: 17 cm

Hauteur: 10 cm

Poids unitaire: 247 g

Emballage produit: Boîte Carton

Date limite de consommation: + de 16 mois

Normes et certificats: CE

Conseils d'utilisation: Lire attentivement la notice avant utilisation.1. Recueillir l'urine du patient dans un flacon.2. Une fois le sachet d'aluminium revenu à température ambiante, retirer le test de son sachet et l'utiliser immédiatement.3. Déposer dans le puits trois gouttes d'urines.4. Lire les résultats du test après 5 minutes. Au delà de 10 minutes, ne pas tenir compte du résultat.



Pour les professionnels de la santé menant des opérations de dépistage en entreprise, au sein d'associations, d'organismes, ou lors d'actions préventives, la boîte de 25 tests urinaires amphétamines est idéale.

Fabriqués en France, ces tests certifiés CE permettent de détecter en 5 minutes la présence éventuelle d'amphétamine dans les urines. Ces tests immun chromatographiques sur cassette répondent à des exigences qualités européennes strictes.

Se présentant sous forme de comprimé, poudre ou cristaux, ce stupéfiant aux effets anorexigènes et psychoanaleptiques. Bien qu'utilisés pour certains traitement de TDAH (Trouble de l'Attention avec ou sans Hyperactivité), les amphétamines peuvent s'avérer addictives voir dangereuses. Insomnie, fièvre, anxiété, acné...

L'utilisation d'un test amphétamine urinaire permet de détecter la présence de ce stupéfiant dans le corps et de prévenir tout risque de dépendance.

Test urinaire version 1 drogue, par boîte de 25 cassettes et 25 pipettes.

Tous nos tests de drogues sont fabriqués en France et suivent un cursus de qualité très strict. En totale conformité avec les exigences européennes, ils bénéficient du marquage CE pour vous assurer une qualité et une précision irréprochable.

Ces tests de drogues sont distribués dans toute l'Europe uniquement auprès des professionnels de la prévention et des entreprises.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer au tableau des durées de positivité des drogues. Il a été publié par « Santé publique » au mois de février 2019. Notez que les données de ce tableau sont générales, la durée de positivité d'une drogue est variable d'un individu à l'autre.