

Test urinaire cocaïne (COC) - Boîtes de 25 tests

Référence P9268



Boîte de 25 **tests urinaires cocaïne** permettant de détecter la présence de **cocaïne dans les urines**. Nos tests sont fabriqués en France.

Pays de fabrication: France

Stock disponible: Illimité : production à la demande

Code douanier: 38220000

Longueur: 13 cm

Quantité par carton: 54

Composition: Plastique

Largeur: 17 cm

Hauteur: 10 cm

Poids unitaire: 247 g

Emballage produit: Boîte Carton

Date limite de consommation: + de 16 mois

Normes et certificats: CE

Conseils d'utilisation: 1- Prendre l'urine du patient dans un flacon.2- Le sachet en aluminium doit être ouvert à température ambiante. Il faudra ensuite le retirer de son sachet et l'utiliser immédiatement.3- Vous disposez de 3 puits, mettre 3 gouttes dans chacun d'entre eux.4- Attendre 5 minutes et lire le résultat. Au-delà de 10 minutes, ne pas prendre en compte l'apparition d'une bande.5- Si deux lignes apparaissent au niveau de la zone de contrôle : le test est négatif.Si aucune bande colorée n'apparaît au niveau de la zone test (T) : le test est positif.Si aucune bande n'apparaît, ou seulement celle située au niveau de la zone de test (T) : le test est non significatif.



La cocaïne est un stupéfiant pouvant entraîner une forte dépendance. Sa consommation est interdite en France, elle reste malgré tout la deuxième drogue la plus consommée après le cannabis. Cette

consommation ne cesse d'augmenter au fil des années, sa cause : le prix qui devient de plus en plus abordable. Elle agit très vite sur le corps humain, on estime à deux minutes son temps de réaction lorsque la cocaïne est sniffée. Ce temps s'allonge lorsque la consommation se fait par voie orale ou par injection.

Comme toutes les drogues, la dépendance à la cocaïne peut se faire rapidement. Seulement quelques consommations suffisent à rendre dépendant. La cocaïne provoque ensuite un sentiment de fatigue et entraîne des changements d'humeur. Elle peut alors devenir dangereuse et provoquer des hallucinations, des AVC ou encore des accidents cardiovasculaires.

Chez Drivecase, nous vous proposons des **tests urinaires cocaïne** permettant de dépister la présence de **cocaïne dans l'urine** chez un individu. Il faut savoir que la **cocaïne dans les urines** reste détectable pendant 2 à 4 jours en cas de consommation occasionnelle et pendant 10 à 14 jours chez les personnes en consommant habituellement. Le temps d'interprétation du **test cocaïne** est de 5 minutes et sa date limite d'utilisation est de plus de 16 mois. Notre **test urinaire cocaïne** se vend par boîte de 25 cassettes et 25 pipettes. Il est fabriqué en France et suit un cursus de qualité très strict. Il bénéficie du marquage CE, garantissant qualité et précision irréprochable.

Nos **tests cocaïne** sont uniquement à destination des professionnels de la prévention et des entreprises en Europe. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au tableau des durées de positivité des drogues. Il a été publié par « Santé publique » au mois de février 2019. Notez que les données de ce tableau sont générales, la durée de positivité d'une drogue est variable d'un individu à l'autre.