

Tests drogues urinaires phencyclidine (PCP) - Boîtes de 25 tests

Référence P9269



Boîte de 25 tests urinaires Normés CE destinés à détecter la présence de PCP dans l'organisme du patient.

Pays de fabrication: France

Stock disponible: Illimité : production à la demande

Code douanier: 38220000

Longueur: 13 cm

Composition: Plastique

Largeur: 17 cm

Hauteur: 10 cm

Poids unitaire: 247 g

Emballage produit: Boîte Carton

Date limite de consommation: + de 16 mois

Normes et certificats: CE

Conseils d'utilisation: Etape 1 : Collecter une partie de l'urine du patient dans un flacon. Etape 2 : Laisser reposer le sachet en aluminium à température ambiante avant de l'ouvrir. Retirer le test de son emballage et l'utiliser instantanément. Etape 3 : Apposer 3 gouttes de l'urine dans chaque puits. Etape 4 : Lire le résultat après 5 minutes. Ne plus tenir compte de l'apparition d'une bande au delà de 10 minutes.



Le phencyclidine (PCP) est une drogue hallucinogène et anesthésiante souvent reconnue par l'appellation « drogue du zombie ». Initialement utilisé en tant que médicament, le PCP ne l'est plus actuellement, à cause de ses effets secondaires importants provoquant une agitation et une importante confusion. Cette drogue se montre particulièrement dévastatrice pour la santé dès la première prise, dû au violent syndrome de sevrage qui survient dans les jours suivants. Il n'est donc pas rare que le consommateur reprenne du PCP ou qu'il consomme d'autres drogues pour combler le manque.



Cette drogue doit son nom à certains faits divers ayant eu lieu aux Etats-Unis. A cause de ses effets anesthésiants extrêmement puissants, le phencyclidine a permis à certains consommateurs de ne pas se rendre compte qu'ils s'étaient pris une balle ou qu'ils avaient perdu un membre par exemple.

La consommation de phencyclidine peut faire sombrer son consommateur dans une sorte de dépendance, qui le fera augmenter les doses et sa fréquence de consommation pour ressentir les mêmes effets.

Procurez-vous nos tests de drogues urinaires immun chromatographiques sur cassette, rapides à utiliser et simples à interpréter.

Date limite d'utilisation du test : + de 16 mois

Temps d'interprétation : 5 minutes

Test urinaire version 1 drogue, par boîte de 25 cassettes et 25 pipettes.

Tous nos tests de drogues sont fabriqués en France et suivent un cursus de qualité très strict. En totale conformité avec les exigences européennes, ils bénéficient du marquage CE pour vous assurer une qualité et une précision irréprochable.

Ces tests de drogues sont distribués dans toute l'Europe uniquement auprès des professionnels de la prévention et des entreprises.