

Tests drogues urinaires MDMA - Boîtes de 25 tests

Référence P9270



MDMA

Boite de 25 tests urinaire permettant de détecter la présence de MDMA : méthylènedioxyméthamphétamine. Test fabriqué en France.

Pays de fabrication: France

Stock disponible: Illimité : production à la demande

Code douanier: 38220000

Longueur: 13 cm

Composition: Plastique

Largeur: 17 cm

Hauteur: 10 cm

Poids unitaire: 247 g

Emballage produit: Boîte Carton

Date limite de consommation: + de 16 mois

Normes et certificats: CE

Conseils d'utilisation: 1- Prendre l'urine du patient dans un flacon.2- Le sachet en aluminium doit être ouvert à température ambiante. Il faudra ensuite le retirer de son sachet et l'utiliser immédiatement.3- Vous disposez de 3 puits, mettre 3 gouttes dans chacun d'entre eux.4- Attendre 5 minutes et lire le résultat. Au-delà de 10 minutes, ne pas prendre en compte l'apparition d'une bande.5- Si deux lignes apparaissent au niveau de la zone de contrôle : le test est négatif.Si aucune bande colorée n'apparaît au niveau de la zone test (T) : le test est positif.Si aucune bande n'apparaît, ou seulement celle située au niveau de la zone de test (T) : le test est non significatif.



La méthylènedioxyméthamphétamine, plus connu sous le nom d'ecstasy est un stupéfiant pouvant être

très dangereux pour un individu. Son utilisation était autorisée dans le cadre d'application psychiatrique et est désormais interdite à la commercialisation et à la consommation.

La MDMA provoque des effets toxiques comme une hyperthermie, de la paranoïa, voire des problèmes mentaux. Elle est régulièrement utilisée en tant que drogue et entraîne une forte dépendance. A long terme, la MDMA peut entraîner des problèmes au niveau du foie, allant même jusqu'à la cirrhose.

Il faut savoir qu'un test d'urine classique ne détecte pas forcément la présence de méthylènedioxyméthamphétamine. C'est pourquoi nous vous proposons un test urinaire capable de dépister la MDMA rapidement. En effet, seulement 5 minutes suffisent à savoir si le résultat est positif et négatif, notre test est également facile à réaliser. Nos tests sont immun chromatographiques sur cassette et sont basés sur une méthode de mise en compétition permettant d'identifier un anticorps spécifique.

Nos tests sont valables pendant plus de 16 mois et sont vendus par boîte de 25 cassettes et 25 pipettes. Ils sont fabriqués en France et bénéficient du marquage CE assurant une qualité et une précision irréprochable. Ces tests urinaires sont conformes aux exigences européennes et suivent un cursus de qualité très strict.

Attention, ces tests sont distribués seulement en Europe auprès des professionnels de la prévention et des entreprises.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer au tableau des durées de positivité des drogues. Il a été publié par « Santé publique » au mois de février 2019. Notez que les données de ce tableau sont générales, la durée de positivité d'une drogue est variable d'un individu à l'autre.