

Tests drogues urinaires métabolite de méthadone (EDDP) - Boîtes de 25 tests

Référence P9285



EDDP

Boîte de 25 tests urinaires Normés CE destinés à détecter la présence excessive de la métabolite de méthadone (EDDP) dans l'organisme du patient.

Nos tests de dépistage urinaires sont soumis à des processus de qualité très stricts afin de vous assurer une excellente qualité et une réelle fiabilité.

Pays de fabrication: France

Stock disponible: Illimité : production à la demande

Code douanier: 38220000

Longueur: 13 cm

Composition: Plastique

Largeur: 17 cm

Hauteur: 10 cm

Poids unitaire: 221 g

Emballage produit: Boîte Carton

Date limite de consommation: + de 16 mois

Normes et certificats: CE

Conseils d'utilisation: Etape 1 : Collecter une partie de l'urine du patient dans un flacon. Etape 2 : Laisser reposer le sachet en aluminium à température ambiante avant de l'ouvrir. Retirer le test de son emballage et l'utiliser instantanément. Etape 3 : Apposer 3 gouttes de l'urine dans chaque puits. Etape 4 : Lire le résultat après 5 minutes. Ne plus tenir compte de l'apparition d'une bande au delà de 10 minutes.



La méthadone est un médicament de substitution, utilisé dans le cadre de traitements des patients qui effectuent un sevrage de leur addiction aux drogues opiacées.



L'EDDP représente le métabolite de la méthadone : autrement dit, c'est la molécule obtenue après que l'organisme humain ait modifié la molécule de base de la méthadone afin de pouvoir l'éliminer du corps humain. C'est ce métabolite que l'on retrouve dans les urines.

Ainsi, l'EDDP représente un marqueur plus fiable que la méthadone en elle-même dans le suivi des patients sous traitement de substitution. En effet, l'élimination urinaire de la méthadone varie en fonction de plusieurs paramètres : l'obtention d'un résultat négatif ne correspond donc pas forcément à une non-observance du traitement. De plus, la mesure de l'EDDP permet la détection des fraudes par ajout de méthadone à l'urine.

Réaliser un test de drogue urinaire se montre utile pour détecter la présence excessive de méthadone dans l'organisme. En effet, la méthadone représentant un traitement de substitution aux drogues dures, les patients susceptibles de ressentir un manque auront tendance à surdoser la méthadone. Un surdosage provoque chez l'utilisateur une forte somnolence (extrêmement dangereux au volant), constipation, dysfonction sexuelle, sudation, gain de poids, aménorrhée, apathie et insomnie.

Procurez-vous nos tests de drogues urinaires immunochromatographiques sur cassette, rapides à utiliser et simples à interpréter.

Date limite d'utilisation du test : + de 16 mois

Temps d'interprétation : 5 minutes

Test urinaire version 1 drogue, par boîte de 25 cassettes et 25 pipettes.

Tous nos tests de drogues sont fabriqués en France et suivent un cursus de qualité très strict. En totale conformité avec les exigences européennes, ils bénéficient du marquage CE pour vous assurer une qualité et une précision irréprochable.

Ces tests de drogues sont distribués dans toute l'Europe uniquement auprès des professionnels de la prévention et des entreprises.