

Alcotest 5000® Dräger sans contact

Référence P9351



L'alcotest 5000® de Dräger est un éthylotest électronique sans contact, permettant de contrôler l'alcoolémie chez un grand nombre de personnes en peu de temps.

Pays de fabrication: Allemagne

Stock disponible: Disponible

Longueur: 63 cm

Composition: Plastique ABS

Largeur: 41 cm

Hauteur: 219 cm

Poids unitaire: 245 g




Normes et certificats: CE

Normes et certificats: NF EN 60068-2-27

Normes et certificats: NF EN 60068-2-6

Normes et certificats: NF EN 60068-2-64

Conseils d'utilisation: 1. La personne testée doit respirer régulièrement et calmement avant la prise de l'échantillon. 2. La personne testée doit être capable d'expirer le volume d'air minimal. 3. Pour que le test soit valide, la personne doit souffler sans interruption pendant au moins 1 seconde (paramètres d'usine). 4. La distance entre l'entonnoir et la bouche de la personne testée doit être d'environ 2-3 cm. 5. Attendez au moins 10 minutes après avoir bu de l'alcool, pour effectuer le test. 6. Le rinçage de la bouche avec de l'eau ou une boisson non alcoolisée ne réduit pas ce délai. 7. L'alcool résiduel présent dans la bouche ou les boissons aromatisées (ex : jus de fruit), les sprays buccaux contenant de l'alcool ainsi que certains médicaments peuvent fausser la mesure.

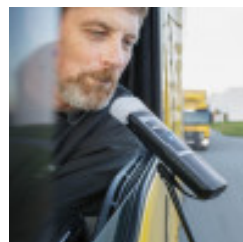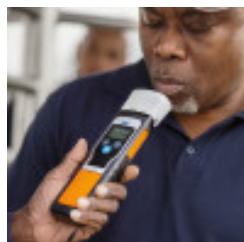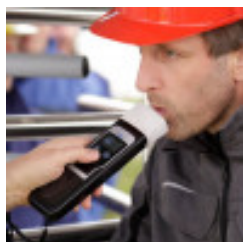

L'alcootest Dräger 5000® est un outil de dépistage d'alcool unique au monde. Sans contact, cet éthylotest électronique est capable de détecter la présence d'alcool dans l'air expiré par un individu.

Utilisable dans divers milieux professionnels, en usine, à l'entrée d'un aéroport, ou d'un chantier, l'alcootest 5000® Draeger permet de tester jusqu'à 12 personnes par minute. L'utilisation de cet alcootest en milieu professionnel permet ainsi de réduire les risques professionnels et ainsi les accidents du travail pouvant être provoqués par une personne alcoolisée.

Comment fonctionne l'alcootest 5000® Dräger ?

L'alcootest 5000® Draeger est un dispositif de dépistage sans contact. Pour tester une personne, il suffit que cette dernière souffle à une distance de 2 à 3 cm du cône de l'alcootest, sans toucher ce dernier avec sa bouche. Son cône remplaçable permet de diriger l'air expiré latéralement afin d'empêcher toute remontée jusqu'au visage de la personne testée. Grâce à son capteur électrochimique DrägerSensor®, cet alcootest offre un résultat rapide en affichant sur son écran de lecture et en émettant un signal sonore, si "oui" ou "non" il y a présence d'alcool dans l'organisme de la personne testée. Cet alcootest n'affichant pas de taux d'alcool précis, il vous est tout à fait possible de déterminer ce dernier grâce à d'autres éthylotests chimiques ou électroniques.

Touches explicites, système d'éclairage par LED rouge ou verte, dragonne et bords antidérapants, l'alcootest 5000® Dräger est conçu pour une utilisation facile et rapide.

L'alcootest 5000® Dräger est fourni avec 3 piles, 3 cônes, une dragonne, une housse de protection et une notice d'utilisation.

Pour les contrôles rapides et d'envergure l'alcootest 5000® Dräger est donc idéal pour réduire le taux d'accidents en entreprise et sur les routes.

Le recalibrage de l'alcootest 5000® Dräger doit être effectué tous les 24 mois.

Informations techniques :

- L' alcootest 5000® Dräger fonctionne avec 3 piles AA de 1,5 V (fournies). 3 piles AA permettent de réaliser 5000 tests.
- L'affichage des résultats se fait au bout d'env. 2 s (de 0 à 0,029 mg/l) et au bout d'env. 6 s (à par ex. 0,5 mg/l, à température ambiante).
- Principe de mesure utilisé : capteur électrochimique DrägerSensor®, spécifique à l'alcool
- Plage de mesure : de 0 à 0,029 mg/l → le symbole « ✓ » indique l'absence d'alcool et le résultat est rendu plus visible par le témoin à LED vert. À partir de 0,030 mg/l → le symbole « X » indique la présence d'alcool et le résultat est rendu plus visible par le témoin à LED rouge. À partir de 2,5 mg/l → hors de la plage de test (↑ ↑ ↑).

Il est recommandé de recalibrer l'appareil une fois par an.

Besoin d'embouts supplémentaires ? Découvrez notre lot de 10 cônes pour alcootest 5000® Dräger !