

## Alcotest 6000® Dräger

Référence P9352



Avec plus d'un million d'exemplaires vendus, l'**alcootest Dräger 6000** est une référence dans le dépistage d'alcool dans l'air expiré. Portable, compact et fiable, cet appareil est destiné aux professionnels.

Pays de fabrication: Allemagne

Stock disponible: Disponible

Code douanier: 90271010

Longueur: 55 cm

Composition: Plastique ABS

Largeur: 141 cm

Hauteur: 31 cm

Poids unitaire: 150 g

Normes et certificats: CE

Normes et certificats: NF EN 15964

Normes et certificats: NF EN 60068-2-27

Normes et certificats: NF EN 60068-2-6

Normes et certificats: NF EN 60068-2-64

Conseils d'utilisation: Température d'utilisation :

-5°C +50°C Plage de mesure : 0 à 2,5 mg/l; en cas de dépassement de la plage de mesure, un message s'affiche1. La personne testée doit respirer régulièrement et calmement avant la prise de l'échantillon.2. La personne testée doit être capable d'expirer le volume d'air minimal.3. Pour que le test soit valide, la personne doit souffler sans interruption pendant au moins 1 seconde (paramètres d'usine).4. La distance entre l'entonnoir et la bouche de la personne testée doit être d'environ 2-3 cm.5. Attendez au moins 10 minutes après avoir bu de l'alcool, pour effectuer le test.6. Le rinçage de la bouche avec de l'eau ou une boisson non alcoolisée ne réduit pas ce délai !7. L'alcool résiduel présent dans la bouche ou les boissons aromatisées (ex : jus de fruit), les sprays buccaux contenant de l'alcool ainsi que certains médicaments peuvent fausser la mesure.



Les opérations de dépistage d'alcool dans l'air expiré se réalisent dans toutes les conditions et à toute heure. Par temps de pluie ou de froid ou dans la nuit, l'appareil doit permettre un dépistage facile et rapide.

L'**alcotest Dräger 6000** est prêt à l'emploi et nécessite 2 secondes pour être utilisé après sa mise en marche. Son fonctionnement est simplifié : après l'avoir allumé, il suffit d'appuyer sur la touche verte OK au centre de l'appareil pour démarrer la procédure. Cette même touche sera la seule à utiliser tout au long de la procédure de test. Les deux autres touches présentes servent à la navigation. La facilité d'utilisation est accompagnée de messages clairs, écrits en toutes lettres sur un écran large et rétroéclairé. Enfin, un signal LED et sonore indique que la procédure de mesure est terminée. Les touches de navigation permettent également de consulter les derniers résultats du test. Grâce à son enregistreur de données, l'alcotest Dräger 6000 peut enregistrer jusqu'aux 500 derniers tests avec des numéros, permettant de faire un suivi précis des contrôles effectués et d'assurer la traçabilité des résultats.

La fiabilité et la précision du capteur électrochimique de l'**alcotest 6000 Dräger** ont été testées. Malgré des températures allant de  $-5^{\circ}\text{C}$  ou  $+50^{\circ}\text{C}$ , l'outil est précis et la mesure fiable. Le capteur possède une longue durée de vie, ce qui lui permet également de rester fiable dans le temps.

Lorsque l'on effectue un test d'alcoolémie avec un alcotest électronique, il est important de respecter certaines mesures d'hygiène pour la sécurité de tous. L'**alcotest Dräger 6000** est réfléchi pour réaliser des tests de la façon la plus hygiénique possible. Pour cela, l'embout buccal Slide'n'click créé pour la été développé. Cet embout se fixe dans le support prévu qui peut se clipser aisément, et ce, même dans l'obscurité. L'embout possède un éjecteur qui permet de l'expulser sans avoir à toucher les zones potentiellement contaminées.

Pour garantir un maximum d'hygiène au sujet testé, l'ethylotest Dräger empêche systématiquement toute tentative d'obstruction ; il est impossible de boucher la sortie d'air pour tenter de contourner l'appareil durant un test. Une entretoise située sur l'embout buccal empêche tout contact entre les lèvres de la personne testée et le boîtier.

Il est recommandé de recalibrer l'appareil une fois par an.  
Besoin d'embouts supplémentaires ? Découvrez notre lot de 100 embouts alcotest 6000.