

Test salivaire THC (Cannabis) 15 ng/ml

Référence P5047

CE



THC

Test salivaire THC en une étape. Seuil de détection de 15 ng/l. Temps d'interprétation : moins de 10 min.

Pays de fabrication: France

Stock disponible: + 10 000 unités

Code douanier: 3822000000

Longueur: 15.5 cm

Quantité par carton: 54

Composition: Plastique

Largeur: 6.5 cm

Hauteur: 6.5 cm

Poids unitaire: 7 g

Emballage produit: Boîte Carton

Emballage produit: Sachet aluminium

Date limite de consommation: + de 20 mois

Normes et certificats: CE

Conseils d'utilisation: 1. Ouvrir le sachet en aluminium, sortir le test et retirer le bouchon. 2. Pour accélérer le processus de collecte, bouger la langue d'un côté à l'autre de la bouche pour accumuler la salive avant de commencer. Déposer la partie absorbante de goût légèrement mentholé du test sous la langue, tout en tenant le test incliné vers le haut et attendre de voir le front de migration atteindre la ou les lignes de contrôle (C). 3. Déposer le test sur une surface plane et propre. Déclencher le chronomètre. 4. Détacher la bandelette adhésive pour révéler les résultats qui apparaissent à partir de 3 minutes. Confirmer la lecture des résultats au bout de 5 minutes. Ne pas lire les résultats au-delà de 15 minutes.



Le test salivaire THC a été conçu pour vous révéler en quelques minutes la présence de drogue dans la salive. Pour se faire, notre test salivaire THC détecte la molécule psychoactive du cannabis, nommée 9-THC. En effet, toute consommation de cannabis contamine la cavité buccale de plusieurs millions de molécules 9-THC. Dès lors que leur concentration est supérieure ou égale à 15 ng/ml, le résultat salivaire

se révèle positif.

Pour plus de sûreté et confidentialité, une bande blanche autocollante masque la partie du test indiquant un résultat positif.

Facile d'utilisation, peu encombrant et qualitatif, le test salivaire THC permettra de contrôler si le sujet testé est positif ou non au THC (cannabis).

Ce test peut être effectué dans n'importe quel lieu et ne nécessite aucune condition si ce n'est qu'il ne faut ni boire, ni manger voire même fumer lors de la réalisation du test. Après ouverture du sachet, il vous suffira de placer la mèche au goût légèrement mentholé sous la langue. Attention, la molécule se fixe principalement sur les muqueuses. Veillez à bien placer la bande sous la langue afin d'être en contact avec les muqueuses. Une fois que la mèche est suffisamment imprégnée de salive (quelques secondes), vous pourrez déposer le test sur une surface plane et lire les résultats dès 3 minutes.

La lecture du résultat est très simple. Une première ligne C dite de "contrôle" doit impérativement apparaître. Cette ligne indique que le test est valide. Puis, une deuxième ligne T, dite de "Test" permet de révéler la présence ou non de THC. Si la deuxième ligne T apparaît, cela signifie que le test est négatif. Néanmoins, si la ligne T n'apparaît pas, le test est alors positif et affirme une prise de cannabis de moins de 6 heures.

Notre test salivaire THC est fabriqué dans un laboratoire en France pour une meilleure traçabilité. Il dispose également du marquage CE garantissant une haute fiabilité des résultats.

Le test salivaire THC est-il au même taux que ceux des forces de l'ordre ? Ce test a un seuil de 15 ng/ml, ce qui correspond au seuil légal en France (Arrêté du 13 décembre 2016, section 1 - article 3). Les forces de l'ordre utilisent des tests ayant un seuil de 5 ng/ml. Il est à noter que toute analyse salivaire doit généralement être confirmée par une prise de sang.

Date limite d'utilisation du test salivaire : + de 20 mois

Seuil de détection du test salivaire de THC : 15 ng/ml

Temps d'interprétation : de 3 à 10 minutes

Conditionné par boîte de 25. Uniquement commandable par multiple de 25.

Retrouvez ci-dessous comment utiliser le test salivaire THC (cannabis) 15 ng/ml :