

Tests salivaires multidrogues 6 en 1 (THC, COC, OPI, AMP, MET et BZO)

Référence P5048

CE



Test salivaire multidrogue, ce test détecte en tout 6 stupéfiants différents : THC, COC, OPI, AMP, MET et BZO.

Temps d'interprétation : moins de 10 min.

Seuils de détection de chaque stupéfiant : THC: 15ng/ml - COC: 20 ng/ml - OPI: 40 ng/ml - AMP: 50 ng/ml - MET: 50 ng/ml - BZO: 30 ng/ml

Conditionnement : vendu par boîte de 5 tests.

Pays de fabrication: France

Stock disponible: + 5 000 unités

Code douanier: 3822000000

Longueur: 15.5 cm

Largeur: 6.5 cm

Poids unitaire: 10 g

Emballage produit: Boîte Carton

Emballage produit: Sachet aluminium

Date limite de consommation: + de 16 mois

Normes et certificats: CE

Conseils d'utilisation: 1. Ouvrir le sachet en aluminium, sortir le test et retirer le bouchon. 2. Pour accélérer le processus de collecte, bouger la langue d'un côté à l'autre de la bouche pour accumuler la salive avant de commencer. Déposer la partie absorbante de goût légèrement mentholé du test sous la langue, tout en tenant le test incliné vers le haut et attendre de voir le front de migration atteindre la ou les lignes de contrôle (C). 3. Déposer le test sur une surface plane et propre. Déclencher le chronomètre. 4. Détacher la bandelette adhésive pour révéler les résultats qui apparaissent à partir de 3 minutes. Confirmer la lecture des résultats au bout de 5 minutes. Ne pas lire les résultats au-delà de 15 minutes.



En France, les accidents impliquant une personne ayant consommé des stupéfiants représentent 23% des accidents mortels. La consommation de drogue est un réel fléau pour la sécurité routière.

C'est pour sensibiliser et prévenir des dangers de la consommation de drogue, que nous vous proposons ce **test salivaire multidrogue**. Idéal pour sensibiliser divers publics (adultes, jeunes adultes, adolescents), lors de divers événements préventifs ou autres actions de communication (forums, formations, festivals ...).

Une révolution dans le monde des tests de stupéfiants : ce test de drogue salivaire permet le dépistage de 6 drogues différentes en une seule fois. Il suffit de l'insérer dans la bouche de la personne à tester et les résultats apparaîtront directement sur le contrôleur. Veillez à bien placer la bande sous la langue afin d'être en contact avec les muqueuses.

Date limite d'utilisation du test : + de 16 mois

Drogues détectées : THC : cannabis, marijuana, haschisch - COC : cocaïne et crack - OPI : héroïne et opiacés - AMP : amphétamines - MET : méthamphétamine - BZO : Benzodiazépine.

Seuils de détection : THC: 15ng/ml - COC: 20 ng/ml - OPI: 40 ng/ml - AMP: 50 ng/ml - MET: 50 ng/ml - BZO: 30 ng/ml

Temps d'interprétation : - de 10 minutes

Pour plus d'informations, veuillez vous référer au tableau des durées de positivité des drogues. Il a été publié par « Santé publique » au mois de février 2019. Notez que les données de ce tableau sont générales, la durée de positivité d'une drogue est variable d'un individu à l'autre.

Vendu par boîte de 5 tests salivaires.