

## Tests urinaires THC (Cannabis) à 3 seuils (boîte de 8)

Référence P5055



Boîte de 8 tests urinaires THC avec paliers de concentration : faible (20 ng/l), moyen (50 ng/l) ou fort (150 ng/l). Temps d'interprétation : 5 min.

Pays de fabrication: France

Stock disponible: Illimité : production à la demande

Code douanier: 38220000

Longueur: 13 cm

Composition: Plastique

Largeur: 17 cm

Hauteur: 10 cm

Poids unitaire: 209 g

Emballage produit: Boîte Carton

Date limite de consommation: + de 16 mois

Normes et certificats: CE

Conseils d'utilisation: 1- Prendre l'urine du patient dans un flacon.2- Le sachet en aluminium doit être ouvert à température ambiante. Il faudra ensuite le retirer de son sachet et l'utiliser immédiatement.3- Vous disposez de 3 puits, mettre 3 gouttes dans chacun d'entre eux.4- Attendre 5 minutes et lire le résultat. Au-delà de 10 minutes, ne pas prendre en compte l'apparition d'une bande.5- Si deux lignes apparaissent au niveau de la zone de contrôle : le test est négatif. Si aucune bande colorée n'apparaît au niveau de la zone test (T) : le test est positif. Si aucune bande n'apparaît, ou seulement celle située au niveau de la zone de test (T) : le test est non significatif.



Ce test urinaire THC permet de détecter rapidement un palier de concentration faible (20 ng/ml) , moyen (50 ng/ml) ou fort (150 ng/ml) de THC (cannabis), ce qui facilite l'interprétation des résultats et le suivi d'une consommation ou d'un sevrage. L'utilisation est très simple et ne demande pas plus d'une minute. Les résultats apparaissent au bout de 5 min.

Ces tests urinaires sont livrés par boîtes de 8, accompagnés d'une notice. Les tests de drogues respectent les normes CE 98/97/CE et sont fabriqués en France.



**Date limite d'utilisation du test : + de 16 mois**  
Les tarifs indiqués ci-dessous sont pour des boîtes de 8 pièces.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer au tableau des durées de positivité des drogues. Il a été publié par « Santé publique » au mois de février 2019. Notez que les données de ce tableau sont générales, la durée de positivité d'une drogue est variable d'un individu à l'autre.