

Test urinaire multidrogues (11 en 1) - Normes CE

Référence P5057



Test urinaire multidrogues, conditionné par boîtes de 8 au format cassette. Drogues détectées : THC, AMP, MDMA, BAR, BZO, MET, BUP, COC, MOP, TCA, MTD. Temps d'interprétation : 5 min.

Pays de fabrication: France

Stock disponible: Illimité : production à la demande

Code douanier: 38220000

Longueur: 13 cm

Composition: Plastique

Largeur: 17 cm

Hauteur: 10 cm

Poids unitaire: 247 g

Emballage produit: Boîte Carton

Emballage produit: Sachet aluminium

Date limite de consommation: + de 16 mois

Normes et certificats: CE

Substance	Présence	Unité
THC	+	µg/mL
AMP	+	µg/mL
MDMA	+	µg/mL
BAR	+	µg/mL
BZO	+	µg/mL
MET	+	µg/mL
BUP	+	µg/mL
COC	+	µg/mL
MOP	+	µg/mL
TCA	+	µg/mL
MTD	+	µg/mL

Le **test urinaire multidrogues** est un dispositif immunochromatographique sur cassette, conçu pour détecter la **présence de nombreuses drogues dans les urines**, couvrant un total de 11 substances différentes. Ces tests de dépistage utilisent une méthode de mise en compétition qui permet d'identifier des anticorps spécifiques à chaque drogue cible.

Ces tests de dépistage de drogues sont spécifiquement destinés aux entreprises et aux organismes publics souhaitant effectuer des dépistages en interne. Le **test urinaire multidrogues** permettra de détecter les substances illicites les plus couramment utilisées en France.

Le dépistage de drogues en entreprise est un outil essentiel pour assurer la sécurité, la productivité et la conformité légale.

La prise en main du test est facilitée grâce à son format cassette.

Conseils d'utilisation :

Prendre l'urine du patient dans un flacon. Retirez la cassette du sachet en aluminium. Le sachet est à ouvrir à température ambiante. Une fois la cassette retirée, l'utiliser immédiatement. Vous disposez de 5 puits, mettre 3 gouttes dans chacun d'entre eux à l'aide d'une pipette (fournie dans le kit) puis attendre 5 minutes pour pouvoir lire le résultat. Au-delà de 10 minutes, ne pas prendre en compte l'apparition d'une bande.

Pour connaître le résultat du test :

Si deux lignes apparaissent au niveau de la zone de contrôle : le test est négatif.

Si aucune bande colorée n'apparaît au niveau de la zone test : le test est positif.

Si aucune bande n'apparaît, ou seulement celle située au niveau de la zone de test : le test est non significatif.

Date limite d'utilisation du test : + de 16 mois

Temps d'interprétation : 5 minutes

Test multidrogue 11 en 1, par boîte de 8 cassettes et 8 pipettes.

Ce test fournit un résultat analytique préliminaire. Une méthode chimique doit être utilisée pour confirmer le résultat.

Drogues détectées :

THC : cannabis (50 ng/ml), AMP : Amphétamines (300 ng/ml), MDMA : Méthylènedioxyméthamphétamine (500 ng/ml), BAR : Barbituriques (300 ng/ml), BZO : Benzodiazépines (300 ng/ml), MET : Méthamphétamine (300 ng/ml), BUP : Buprénorphine (10 ng/ml), COC : Cocaïne (300 ng/ml), MOP : Morphine (300 ng/ml), TCA : Antidépresseurs tricycliques (1000 ng/ml), MTD : Méthadone (300 ng/ml)

Tous nos tests de drogues sont fabriqués en France et suivent un cursus de qualité très strict. En totale conformité avec les exigences européennes, ils bénéficient du marquage CE pour vous assurer une qualité et une précision irréprochable. Ces tests de drogues sont distribués dans toute l'Europe auprès des professionnels de la prévention et des entreprises.

Les tarifs indiqués ci-dessus sont pour des boîtes de 8 unités.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer au tableau des durées de positivité des drogues. Il a été publié par « Santé publique » au mois de février 2019. Notez que les données de ce tableau sont générales, la durée de positivité d'une drogue est variable d'un individu à l'autre.