

Test drogue urinaire THC (Cannabis) - Boîtes de 25

Référence P5049



Test immunochromatographiques sur cassette, permettant de détecter la présence de THC dans les urines. Interprétation en 5 min. Seuil de drogue : 50 ng/ml.

Pays de fabrication: France

Stock disponible: Illimité : production à la demande

Code douanier: 38220000

Longueur: 13 cm

Quantité par carton: 54

Composition: Plastique

Largeur: 17 cm

Hauteur: 10 cm

Poids unitaire: 220 g

Emballage produit: Boîte Carton

Normes et certificats: CE

Conseils d'utilisation: 1- Prendre l'urine du patient dans un flacon. 2- Le sachet en aluminium doit être ouvert à température ambiante. Il faudra ensuite le retirer de son sachet et l'utiliser immédiatement. 3- Vous disposez de 3 puits, mettre 3 gouttes dans chacun d'entre eux. 4- Attendre 5 minutes et lire le résultat. Au-delà de 10 minutes, ne pas prendre en compte l'apparition d'une bande. 5- Si deux lignes apparaissent au niveau de la zone de contrôle : le test est négatif. Si aucune bande colorée n'apparaît au niveau de la zone test (T) : le test est positif. Si aucune bande n'apparaît, ou seulement celle située au niveau de la zone de test (T) : le test est non significatif.



Le **cannabis** est connu pour sa fonction d'inhibiteur de mémoire et de concentration, il déforme la réalité pouvant aller jusqu'à la paranoïa, l'anxiété et l'hallucination. Les risques liés à la **consommation de cannabis** impactent directement votre entreprise. Votre productivité, s'en ressent ralentie car le **cannabis** impacte la concentration et ralentit le temps de réaction dans des tâches pourtant évidentes. Bien plus grave, la **dépendance** peut amener le salarié à prendre des risques pour sa propre **sécurité** mais aussi pour celle de ses collaborateurs : prise de confiance, manipulation dangereuse d'outils et de



machines, **conduite** d'engins sans précautions, prise de décisions hâtives... Grâce à un **test de dépistage de THC rapide et facile d'utilisation**, assurez la sécurité la santé physique et mentale de vos employés.

Le Conseil d'État dans une décision en date du 5 décembre 2016 établit le droit aux entreprises d'avoir recours à un **test salivaire de détection de produits stupéfiants**. Ce **test THC salivaire** a pour objectif la détection immédiate et la lecture instantanée de **substances illicites** type **THC**, il révèle une consommation récente.

Notre test salivaire THC a un seuil de concentration jusqu'à 50 ng/mL. En effet, l'interprétation n'est pas suffisamment précise s'il elle se situe entre 0,5 et 14,99 ng/mL. Avec ce produit de dépistage, ne laissez aucune place au doute.

Nos tests de drogues urinaires sont des tests immunochromatographiques sur cassette, permettant de détecter la présence de drogues dans les urines. Les tests sont basés sur une méthode de mise en compétition qui permet d'identifier un anticorps spécifique. Ils sont rapides à utiliser et simples à interpréter.

Date limite d'utilisation du test : + de 16 mois

Temps d'interprétation : 5 minutes

Seuil de la drogue à détecter : 50 ng/ml

Tous nos tests de drogues sont fabriqués en France et suivent un cursus de qualité très strict. En totale conformité avec les exigences européennes, ils bénéficient du marquage CE pour vous assurer une qualité et une précision irréprochable.

Les tarifs indiqués ci-dessous sont pour des boîtes de 25 unités (cassettes et pipettes comprises, hors pots à urine).

Pour plus d'informations, veuillez vous référer au tableau des durées de positivité des drogues. Il a été publié par « Santé publique » au mois de février 2019. Notez que les données de ce tableau sont générales, la durée de positivité d'une drogue est variable d'un individu à l'autre.